


# TENA *Identifi* systeem


## Uitgebreide Lozingsrapporten




### De logger plaatsen

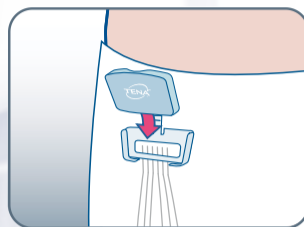

Plaats de logger in de connector op de Sensor Wear.

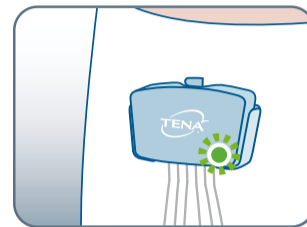


Een groen knipperend lampje is zichtbaar gedurende 15 seconden om aan te geven dat de logger correct geplaatst is. Het lampje gaat uit, maar de logger blijft meten.

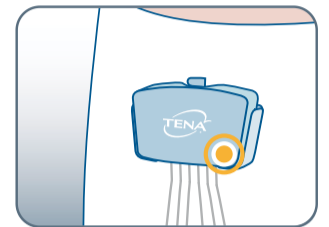

Als er een oranje lampje verschijnt, dan is de batterij van de logger bijna leeg en moet deze worden opgeladen. Plaats de logger in de oplader, maar laat de bewoner de Sensor Wear aanhouden.


### Wisselen van de Sensor Wear

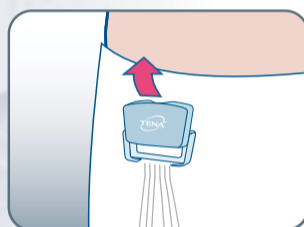

Haal bij de volgende gewone verschooning de logger uit de connector voordat u de Sensor Wear verwijderd. De logger blijft bij de bewoner.




Gooi de gebruikte Sensor Wear weg volgens het protocol van uw verpleeghuis. Gooi de logger niet weg.

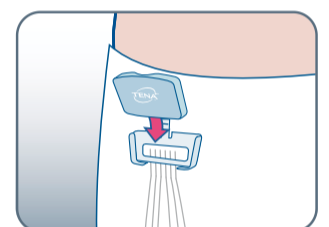


Plaats de herbruikbare logger in de nieuwe schone Sensor Wear nadat de bewoner deze heeft aangetrokken.

### De logger reinigen

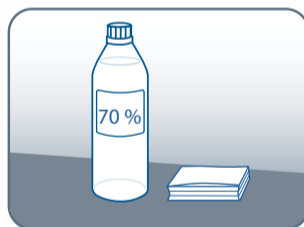


Reinig de logger met niet-corrosief ontsmettingsmiddel als deze vuil is en na elke 72 uur. Volg het ontsmettingsprotocol van uw verpleeghuis.


### De logger opladen

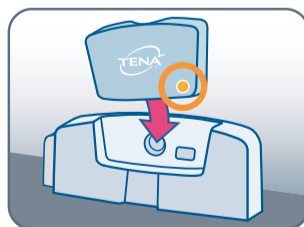

Oranje lampje – Batterij bijna leeg. Plaats de logger in de oplader.

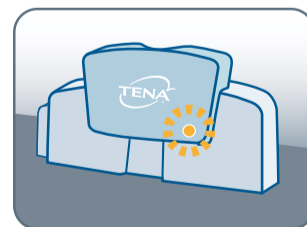


Oranje knipperend lampje – Batterij is aan het opladen.

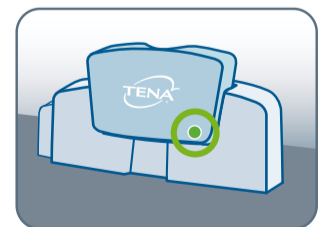

Groen lampje – Batterij volledig opgeladen

### Indicatorlampje

Logger in gebruik:

 Groen knipperend lampje – Correct gemonteerd

 Oranje lampje – Batterij bijna leeg

Logger in oplader:

 Oranje knipperend lampje – Aan het opladen

 Groen lampje – Batterij volledig opgeladen

#### Voor infectiecontrole en nauwkeurigheid

Wijs dezelfde logger aan elke bewoner toe tijdens de 72-uurs volperiode. Als u de logger moet opladen tijdens de 72-uurs beoordeling, reinig dan de logger, plaats hem gedurende 30 minuten in de oplader en plaats hem terug in de Sensor Wear. Stel onmiddellijk uw manager op de hoogte en wacht op verdere instructies.