



# Keuzekaart Homecare

MEI 2016

Contacteer ons:  
info@TENA.be



VL

	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
Lady	TENA LADY MINI MAGIC	TENA LADY ULTRA MINI	TENA LADY ULTRA MINI PLUS	TENA LADY MINI	TENA LADY MINI NIGHT	TENA LADY MINI PLUS	TENA LADY NORMAL	TENA LADY EXTRA	TENA LADY EXTRA PLUS	TENA LADY SUPER	TENA LADY MAXI	TENA LADY MAXI NIGHT					
Lady Pants									TENA LADY PANTS DISCREET (M, L)			TENA LADY PANTS DISCREET PLUS (M, L)	TENA LADY PANTS NIGHT (M, L)				
Men		TENA MEN PROTECTIVE SHIELD (EXTRA LIGHT)					TENA MEN LEVEL 1 (LIGHT)	TENA MEN LEVEL 2 (MEDIUM)	TENA MEN LEVEL 3 (SUPER)				TENA MEN PU LEVEL 4 (MAXI)				
Pants											TENA PANTS NORMAL (S, M, L, XL)	TENA PANTS PLUS (XXS, XS, S, M, L, XL)			TENA PANTS SUPER (S, M, L, XL)	TENA PANTS MAXI (M, L, XL)	
Flex												TENA FLEX PLUS (S, M, L, XL)			TENA FLEX SUPER (S, M, L, XL)	TENA FLEX MAXI (S, M, L, XL)	TENA FLEX ULTIMA (M, L)
Comfort												TENA COMFORT PLUS		TENA COMFORT EXTRA	TENA COMFORT SUPER	TENA COMFORT MAXI	TENA COMFORT ULTIMA
Slip												TENA SLIP PLUS (Junior, XS, S, M, L)			TENA SLIP SUPER (S, M, L)	TENA SLIP MAXI (S, M, L)	TENA SLIP ULTIMA (M, L)

**Easy-Select kleurcodering** Om de verbanden en hun bijbehorende absorptieniveau snel te herkennen zijn deze voorzien van het Easy-Select kleurcodering-systeem en een uniform druppelindicatie-systeem. Ieder absorptieniveau heeft zijn eigen kleur en aantal druppeltjes. U vindt deze kleurcodering en druppelindicatie terug op alle verpakkingen én op de verbanden TENA Flex, TENA Comfort en TENA Slip. Bij TENA Flex en TENA Slip dient deze kleurbalk ook om het product in het midden te positioneren zodat het verband juist wordt gefixeerd.

**Het juiste product** Advisering van het juiste product is niet altijd eenvoudig. Een gemakkelijk hulpmiddel hierbij is de TENA Advieswijzer op [www.TENANET.be](http://www.TENANET.be). Daarnaast organiseren we TENA Workshops, waaraan u gratis kunt deelnemen. Belangrijke vragen die u sowieso kunt stellen om tot een goede keus te komen zijn:

- Welke bescherming wordt nu gebruikt?
- Hoeveel urine wordt tussen twee toiletgangen door verloren (druppeltjes, scheutjes of grotere hoeveelheden)?

## Vormen van incontinentie

**Stressincontinentie (inspanningsincontinentie)** De persoon verliest urine bijvoorbeeld bij het lachen, niezen of hoesten. Het kan gaan om verlies van druppels tot scheutjes urine.

**Urge-incontinentie (aandrangincontinentie)** De persoon voelt een sterke aandrang om te plassen en kan het niet ophouden. Het gaat vaak om het verlies van grotere hoeveelheden urine.

**Gemengde incontinentie** De persoon heeft zowel stressincontinentie als urge-incontinentie. Deze vorm van incontinentie komt het meeste voor.

**Overloopincontinentie** De persoon verliest continu druppeltjes urine. De persoon voelt wel aandrang maar het lukt niet om te plassen. Hierdoor blijft de blaas te vol, waardoor de urine gaat 'overlopen'.

**Neurologische incontinentie (voorheen Reflex)** Urineverlies ten gevolge van een neurologisch defect.

**Functionele incontinentie** Functionele incontinentie komt veel voor bij personen in rust- en verzorgingshuizen. Bijvoorbeeld een persoon die het toilet niet meer kan vinden of te lang moet wachten op hulp of een persoon die moeite heeft met de knoop van zijn broek, waardoor hij de urine niet meer kan ophouden.

**Fecesincontinentie** Ongewild verlies van anaal vocht of feces.

**Dubbele incontinentie** De persoon verliest zowel urine als feces.

# Aanlegtechnieken

## Een goed begin is het halve werk

### TENA Men



Haal het verband uit de verpakking, vouw het open en dubbel, verwijder de plakstrook.



Zorg ervoor dat de brede kant van het verband aan de bovenkant zit.



Plak het verband goed vast aan de voorzijde van het ondergoed en trek het omhoog. Zorg ervoor dat het verband goed aansluit op het lichaam.

### TENA Flex\* verband openen



Vouw het product open.



Haal van rechts naar links de band los ...



... en vervolgens van links naar rechts.

### TENA Flex\* staand



Maak de band rond de buik van de gebruiker vast met de klittenbandstrips.



Haal het verband zigzaggend tussen de benen door naar voren en trek het omhoog. Op deze manier wordt een komvorm gemaakt aan de voorzijde van het lichaam.



Maak de uiteinden met de klittenbandstrips vast aan de band.

### TENA Flex\* liggend



Leg de gebruiker op één zijde en plaats de band onder en over de heup. Haal het verband tussen de benen door naar voren.



Draai de gebruiker op de rug en maak de band vast rond de heupen met de klittenbandstrips.



Haal het verband zigzaggend tussen de benen door naar voren en trek het omhoog. Op deze manier wordt een komvorm gemaakt aan de voorzijde van het lichaam. Maak de uiteinden met de klittenbandstrips vast aan de band.

\* TENA Flex kan zowel op de buik als op de rug gesloten worden.

### TENA Lady



Neem het verband uit de verpakking, vouw het open en in de lengte dubbel. Vorm het verband tot een goot.



Verwijder de beschermplak van de plakstrook. Druk de plakstrook stevig aan in het ondergoed (of TENA Fix Cotton Briefs) en trek het omhoog. Let er vooral op dat het verband goed aansluit op het lichaam.

### TENA Slip staand



Als de persoon recht staat, brengt u de slip van voor naar achter tussen de benen aan. Bevestig achtereenvolgens de onderste klittenbandstrips, zodanig dat ze lichtjes naar boven gericht zijn.



Bevestig nu achtereenvolgens de bovenste klittenbandstrips, zodanig dat ze lichtjes naar onder gericht zijn. Controleer of de slip comfortabel en goed zit. De klittenbandstrips zijn ontworpen om meerdere keren verplaatst of hersloten te worden.



Druk de klittenbandstrips zachtjes op de achterzijde die aanvoelt als katoen en strijk ze glad. Trek zachtjes aan de klittenbandstrips om de haakjes te fixeren in de stof van de buitenkant. Dit garandeert een stevige bevestiging.

### TENA Slip liggend



Als de persoon op zijn of haar zij ligt, trekt u het product van voor naar achter tussen de benen door. Trek de slip glad. Bevestig nu achtereenvolgens eerst de onderste plakstrips, zodanig dat ze lichtjes naar boven gericht zijn.



Bevestig daarna eveneens achtereenvolgens de bovenste plakstrips, zodanig dat ze lichtjes naar onder gericht zijn. Controleer of de slip comfortabel en goed zit. De klittenbandstrips zijn ontworpen om meerdere keren verplaatst of hersloten te worden.



Druk de klittenbandstrips zachtjes op de buitenkant die aanvoelt als katoen en strijk ze glad. Trek zachtjes aan de klittenbandstrips om de haakjes te fixeren in de stof van de buitenkant. Dit garandeert een stevige bevestiging.

### TENA Lady Pants, TENA Men Level 4 & TENA Pants



Verwijder het verband bij verzadiging, door de zijaden open te scheuren.



Rol het verband na gebruik op, plak het vast met behulp van de plakstrip op de achterzijde van het verband en gooi het weg.




### Verzorgend Wassen: verzorgende en comfortabele reiniging van het hele lichaam




Verwarm het pakje met TENA Wet Wash Glove washandjes tot een aangename temperatuur in de microgolfoven. (Opwarmen is niet noodzakelijk, de washandjes kunnen ook op kamertemperatuur gebruikt worden).




Pak de washandjes één voor één uit de verpakking. Stel de patiënt op zijn gemak en ga na in hoeverre hij/zij kan meewerken. Respecteer de privacy en waardigheid. Let uit wat u precies gaat doen.

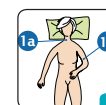

Gebruik in totaal 4 washandjes per volledige wasbeurt en gebruik beide zijden van elk washandje (a en b). Begin met het gezicht en de hals (1a). Was daarna de volledige linkerarm van het bovenlichaam (1b).

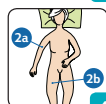

Was nu de volledige rechterarm van het bovenlichaam (2a). Was de rechterarm van het onderlichaam met de andere zijde van het washandje (2b). Begin altijd met de dijen en werk verder in de richting van de voeten.

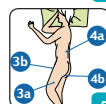

Was vervolgens de linkerarm van het onderlichaam (3a). Was de schaamstreek (3b). Werk altijd van voren naar achteren. Draai de patiënt op zijn/haar rug en was eerst de rug (4a). Eindig met het wassen van de stuit (4b).



Afspoelen en afdrogen is niet nodig. Niet gebruikte washandjes bewaren in de verpakking (goed afsluiten, het pakje kan later opnieuw verwarmd worden). Gooi de gebruikte washandjes weg.

# TENA Advieswijzer


## Voor iedereen het juiste verband

▼ = NEE





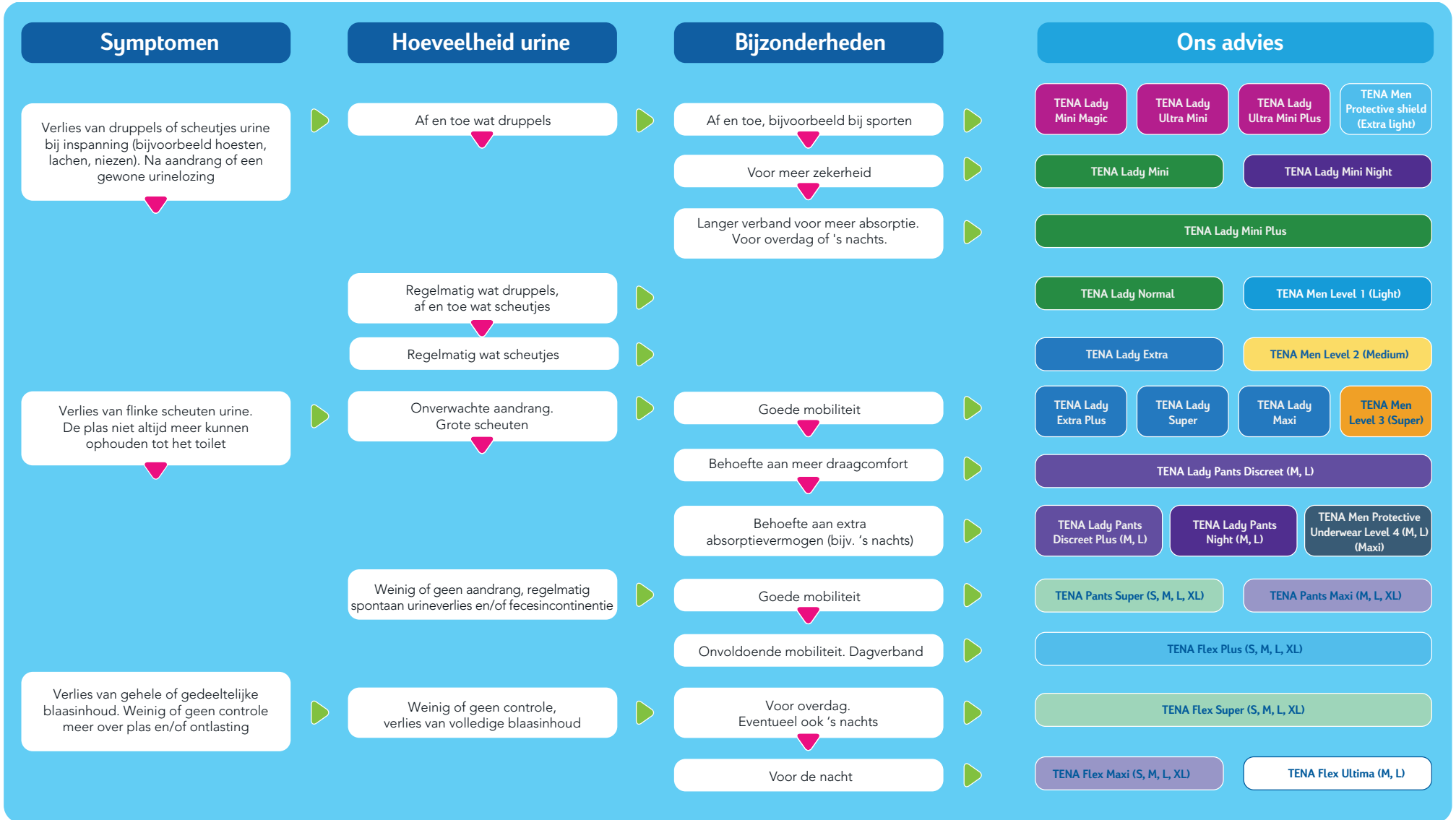

▶ = JA

Wanneer u de juiste vragen stelt bent u al een eind op weg. Een paar voorbeelden:

- Met welke frequentie verliest u urine?
- Welk soort verband gebruikt u momenteel?
- Hoeveel verbanden gebruikt u momenteel?


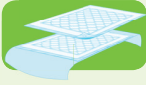







# TENA Productoverzicht

Product	Type/maat/inhoud	Art. no.	CNK-code	Heupomvang	Doosinhoud		
<b>VERBANDEN</b>							
<b>TENA Lady</b>		<b>TENA Lady</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neutraliseert ongewenste geurtjes (Fresh Odour Control)</li> <li>• Snelle opname van urine en droge toplaag</li> <li>• Grotere kern laat urine snel door en houdt de toplaag droog</li> <li>• Lengte-elastieken zorgen voor komvorm en goede pasvorm</li> <li>• Vrouwelijk en modern ontwerp</li> <li>• Toplaag voor extra draagcomfort (Silky Softness)</li> <li>• TENA Lady Extra Plus en Maxi zijn voorzien van de nieuwste InstaDRY™ technologie: absorbeert urine sneller en houdt het beter vast. Let op: de verbanden hebben een voorzijde, middelpunt en een achterzijde (zie afbeelding)</li> </ul> <p><b>TENA Lady Pants:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draagt en oogt als gewoon ondergoed</li> <li>• De sterk absorberende kern zorgt voor zekerheid</li> <li>• Voelt zacht als katoen</li> <li>• Nauwsluitende pasvorm</li> </ul>	   	<b>Mini Magic</b> <b>Ultra Mini</b> <b>Ultra Mini Plus</b> Mini Mini Night Mini Plus Normal Extra Extra Plus Super Maxi Maxi Night	761001 761130 761801 760226 760304 760306 760450 760506 760623 761703 760927 760921	2322-865 2649-952 2399-913 3197-324 2648-764 3197-316 3197-332 2065-407 3054-251 2105-245 3054-244 2922-565	6 x 34 (204) 10 x 28 (280) 6 x 24 (144) 6 x 30 (180) 10 x 16 (160) 6 x 20 (120) 6 x 28 (168) 12 x 20 (240) 6 x 16 (96) 6 x 30 (180) 12 x 12 (144) 6 x 12 (72)		
			<b>TENA Lady Pants</b>				
			Pants Discreet Medium	795512	3161-197	75 - 100 cm	6 x 12 (72)
			Pants Discreet Large	795610	3161-189	95 - 125 cm	6 x 10 (60)
			Pants Discreet Plus Medium	797512	3161-213	75 - 100 cm	6 x 12 (72)
			Pants Discreet Plus Large	797610	3161-205	95 - 125 cm	6 x 10 (60)
			Pants Night Medium	797518	3399-326	75 - 100 cm	6 x 8 (48)
			Pants Night Large	797617	3399-334	95 - 125 cm	6 x 7 (42)
	<b>TENA Men / TENA Men Protective Underwear</b>		<b>TENA Men / TENA Men Protective Underwear</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anatomisch gevormd, speciaal voor mannen</li> <li>• Ademende achterzijde voor verhoogd comfort en discretie</li> <li>• Zacht absorptielaagje: laat urine snel door en houdt de huid droog</li> <li>• Gaat de ontwikkeling van geurtjes tegen (Odour Control)</li> <li>• Gebruik nauwsluitend ondergoed</li> </ul>		Protective shield (Extra light) Level 1 (Light) Level 2 (Medium) Level 3 (Super) Level 4 Medium/Large (Maxi)	750403 750651 750776 750830 798300	3274-479 2682-763 3274-495 2783-280 2806-693	6 x 14 (84) 8 x 14 (112) 6 x 20 (120) 6 x 16 (96) 8 x 10 (80)	
		<b>TENA Pants</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor een perfecte pasvorm en extra zekerheid</li> <li>• Betere en snellere opname voor minder huidirritatie (Dry Fast Core)</li> <li>• Opstaande vochtafstotende randjes, minimaliseren kans op doorlekken (Security Barrier)</li> <li>• TENA Pants Plus XXS is speciaal voor kinderen en volwassenen tot 60 kg</li> <li>• TENA Pants Plus XS, S, M, L, XL, Super S, M, L, XL en Maxi M, L, XL zijn voorzien van de ConfioFit™ technologie, een nieuwe discrete pasvorm. 30% dunner met dezelfde absorptie.</li> </ul>		 	Normal Small Normal Medium Normal Large Normal Extra Large Plus Extra Extra Small Plus Extra Small Plus Small Plus Medium Plus Large Plus Extra Large Super Small Super Medium Super Large Super Extra Large Maxi Medium Maxi Large Maxi Extra Large	791415 791528 791628 791715 790812 792314 792414 792514 792614 792712 793412 793512 793612 793712 794510 794610 794760	3261-468 3234-952 3234-945 3234-929 2737-898 3194-156 3194-149 3042-892 3042-884 3138-013 3194-164 3042-843 3042-876 3138-021 3042-868 3042-850 3437-589	65 - 85 cm 80 - 110 cm 100 - 135 cm 120 - 160 cm 40 - 70 cm 50 - 70 cm 65 - 85 cm 80 - 110 cm 100 - 135 cm 120 - 160 cm 65 - 85 cm 80 - 110 cm 100 - 135 cm 120 - 160 cm 80 - 110 cm 100 - 135 cm 120 - 160 cm	4 x 15 (60) 4 x 18 (72) 4 x 18 (72) 6 x 15 (90) 4 x 12 (48) 4 x 14 (56) 4 x 14 (56) 4 x 14 (56) 4 x 14 (56) 4 x 12 (48) 4 x 12 (48) 4 x 12 (48) 4 x 12 (48) 4 x 12 (48) 4 x 12 (48) 4 x 10 (40) 4 x 10 (40) 4 x 10 (40)

TENA Flex		TENA Flex				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klittenbandsluiting voor het eenvoudig aan- en uitdoen (Superfit)</li> <li>• Flexibel gedeelte in de banden, die de lichaamsbewegingen volgt (ComfiStretch)</li> <li>• Een dubbele pulpmat voor snellere opname, optimale verspreiding en het beter vasthouden van urine (Twin Core Dry Soft Technology)</li> <li>• Taille-elastieken voor en achter: verhoogt pasvorm en helpt doorlekken voorkomen (Flexifit)</li> <li>• Zacht ademend materiaal voor verhoogd comfort en discretie (Air Dry Layer)</li> <li>• Urine-indicator verandert van geel in opvallend blauw, als het product verzadigd raakt (True Blue)</li> <li>• Snelle opname van urine, verkleint de kans op huidirritatie (FeelDrySoft)</li> </ul>		Plus Small	723130	2275-386	61 - 87 cm	3 x 30 (90)
		Plus Medium	723230	2230-977	71 - 102 cm	3 x 30 (90)
		Plus Large	723330	2230-985	83 - 120 cm	3 x 30 (90)
		Plus Extra Large	723430	2342-509	105 - 153 cm	3 x 30 (90)
		Super Small	724130	2636-967	61 - 87 cm	3 x 30 (90)
		Super Medium	724230	2636-983	71 - 102 cm	3 x 30 (90)
		Super Large	724330	2636-991	83 - 120 cm	3 x 30 (90)
		Super Extra Large	724430	2637-635	105 - 153 cm	3 x 30 (90)
		Maxi Small	725122	2275-402	61 - 87 cm	3 x 22 (66)
		Maxi Medium	725222	2230-993	71 - 102 cm	3 x 22 (66)
		Maxi Large	725322	2231-009	83 - 120 cm	3 x 22 (66)
		Maxi Extra Large	725421	2256-329	105 - 153 cm	3 x 21 (63)
		Ultima Medium	725220	3046-844	71 - 102 cm	3 x 20 (60)
Ultima Large	725320	3046-869	83 - 120 cm	3 x 20 (60)		
TENA Comfort		TENA Comfort				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een dubbele pulpmat voor snellere opname, optimale verspreiding en het beter vasthouden van urine (Twin Core Dry Soft Technology)</li> <li>• Verband plooit zich soepel tot een komvorm (All-Round Barrier)</li> <li>• Urine-indicator verandert van geel in blauw, als het product verzadigd raakt (True Blue)</li> <li>• Betere en snellere opname van urine met minder kans op huidirritatie (FeelDry)</li> <li>• TENA Comfort heeft een nieuwe ademende buitenkant (ConfoAir™), voor comfort &amp; gezonde huidconditie.</li> <li>• Gebruik TENA Comfort samen met een Fix Stretchbroekje</li> </ul>		Plus	752846	3238-102		2 x 46 (92)
		Extra	753040	3238-078		2 x 40 (80)
		Super	758136	3238-128		2 x 36 (72)
		Maxi	759128	3238-086		2 x 28 (56)
		Ultima	759205	3238-136		4 x 17 (68)
TENA Slip		TENA Slip				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slip Junior en Slip Extra Small zijn speciaal voor kinderen</li> <li>• TENA Slip Ultima voor superieure absorptie en ultiem comfort door zacht ademend materiaal (Air Dry Layer)</li> <li>• TENA Slip heeft een nieuwe ademende buitenkant (ConfoAir™), dit zorgt voor comfort en een gezonde huidconditie</li> </ul>		Slip Junior	700028	3399-391	50 - 60 cm	4 x 32 (128)
		Plus Extra Small	710430	3238-193	49 - 74 cm	3 x 30 (90)
		Plus Small	710530	3238-227	56 - 85 cm	3 x 30 (90)
		Plus Medium	710630	3238-219	73 - 122 cm	3 x 30 (90)
		Plus Large	710730	3238-201	92 - 144 cm	3 x 30 (90)
		Super Small	711130	3238-250	56 - 85 cm	3 x 30 (90)
		Super Medium	711228	3238-243	73 - 122 cm	3 x 28 (84)
		Super Large	711428	3238-235	92 - 144 cm	3 x 28 (84)
		Maxi Small	710824	3238-177	56 - 85 cm	3 x 24 (72)
		Maxi Medium	710924	3238-169	73 - 122 cm	3 x 24 (72)
		Maxi Large	711024	3238-151	92 - 144 cm	3 x 24 (72)
		Ultima Medium	710521	3238-276	73 - 122 cm	3 x 21 (63)
		Ultima Large	710621	3238-268	92 - 144 cm	3 x 21 (63)
FIXATIE						
TENA Fix, Slip en Stretch		TENA Fix, Slip en Stretch				
Ter fixatie van TENA Comfort <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaat min. 50 wasbeurten mee</li> <li>• Wassen op 60° C, in de droogtrommel tot 60° C</li> </ul>		S (Gele tailleband)	754023	2831-436	70 - 90 cm	20 x 5 (100)
		M (Blauwe tailleband)	754024	2831-493	80 - 100 cm	20 x 5 (100)
		L (Bruine tailleband)	754025	2831-485	90 - 110 cm	20 x 5 (100)
		XL (Groene tailleband)	754026	2831-469	100 - 120 cm	20 x 5 (100)
		XXL (Oranje tailleband)	754027	2831-451	120 - 140 cm	20 x 5 (100)
		XXXL (Paarse tailleband)	754047	3238-144	125 - 180 cm	20 x 5 (100)
TENA Fix Cotton Special		TENA Fix Cotton Special				
Ter fixatie van TENA Comfort <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zacht rekbaar katoen</li> <li>• Duurzaam, ca. 100 wasbeurten, wassen op 90° C, in de droogtrommel tot 60° C</li> </ul>		Small/Medium	756705	1485-283	60 - 90 cm	7 x 5 (35)
		Large/Extra Large	756805	1485-275	80 - 110 cm	6 x 5 (30)
		Extra Extra Large	756905	1497-825	100 - 130 cm	5 x 5 (25)



OVERIGE						
<b>TENA Hygiene sheet</b>					<b>TENA Hygiene sheet</b>	
Bedbeschermende onderlakens zonder absorberende functie • Airlaid: het product is sterker, zachter en voelt textiel-achtig aan.		Steeklaken	80 x 175 cm	774453	3372-778	100 stuks
		Steeklaken	80 x 210 cm	774454	3372-760	100 stuks
		Steeklaken	85 x 160 cm	784430	1530-203	3 x 25 (75)
<b>TENA Bed</b>					<b>TENA Bed</b>	
Absorberende beschermende onderleggers voor bed, meubel of (rol-)stoel • Citroenvormig patroon met pulprijke zones voor een snelle verspreiding van vocht • De toegevoegde superabsorbers zorgen voor extra absorptiecapaciteit • TENA Bed Plus Wings geeft extra bescherming tegen lekkage en heeft vleugels van zacht materiaal waardoor de onderlegger beter op zijn plaats blijft		Plus	40 x 60 cm	770118	3339-520	4 x 40 (160)
		Plus	60 x 60 cm	770119	3339-496	4 x 40 (160)
		Plus	60 x 90 cm	770120	3339-504	4 x 35 (140)
		Plus Wings	80 x 180 cm	771102	3034-352	4 x 20 (80)
<b>TENA Servetten</b>					<b>TENA Servetten</b>	
	Medium	37 x 48 cm	720511	2654-432	6 x 150 (900)	
	Large	37 x 68 cm	720611	2654-440	6 x 150 (900)	

TENA Huidverzorging	Type / inhoud	Art. no.	CNK-code	Extra informatie	Doos inhoud
<b>Verzorgend wassen</b>					
Voor de dagelijkse reiniging en verzorging van de huid. • 3-in-1 formule: reinigt, verzorgt en beschermt de huid zonder afspoelen en drogen • TENA Wash Cream - met 3-in-1 formule, geschikt voor dagelijkse lichaamswasbeurt • TENA Wash Mousse - met 3-in-1 formule, zeer geschikt bij fecesincontinentie • TENA Wash Glove - zacht en sterk washandje met het comfort van een wegwerpwashandje (met en zonder plastic binnenzijde) • TENA Soft Wipe - sterk absorberend doekje voor een extra zacht gevoel • TENA Wet Wipe - sterk vochtig doekje met 3-in-1 formule • TENA Wet Wash Glove - kant en klare met lotion geïmpregneerde washanden, reinigen en verzorgen de kwetsbare en gevoelige oudere huid zonder afspoelen en drogen • TENA Shampoo Cap - cap bevat shampoo en conditioner, naspoeien is niet nodig		<b>Verzorgend wassen</b>			
	Wash Glove with plastic lining	740500	2322-386	Droge washand + plastic binnenkant	6 x 175 (1050)
	Wash Glove	740400	2322-378	Droge washand	6 x 200 (1200)
	Wash Glove	740701	3437-605	Droge washand per 50 st. in doosje	12 x 50 (600)
	Wash Cream 250 ml	4238	3244-621	Tube	10 stuks
	Wash Cream 500 ml	4242	3244-613	Flacon met pompje	10 stuks
	Wash Cream 1000 ml	4249	3244-605	Flacon met pompje	8 stuks
	Soft Wipe 30x32 cm	740710	2322-394	Dispenser	8 x 135 (1080)
	Wet Wipe 32x20 cm	6479	3244-589	Dispenser	12 x 48 (576)
	Wash Mousse 400 ml	6570	3244-597	Spray	15 stuks
Wet Wash Glove No Perfume	1158	3244-761	Geïmpregneerd met lotion	30 x 8 (240)	
Wet Wash Glove	1116	3244-639	Geïmpregneerd met lotion	30 x 8 (240)	
Shampoo Cap	1042	3076-585	Bevat shampoo en conditioner	30 stuks	
<b>Verzorgen</b>					
Verzacht de gevoelige huid en houdt de natuurlijke balans van de huid in stand • Skin Lotion - voor de normale tot droge huid (mild geïmpregneerd) • Skin Cream - voor de extra droge huid (mild geïmpregneerd) • Skin Care Oil - voor de droge en gevoelige huid (parfum vrij)		<b>Verzorgen</b>			
	Skin Lotion 250 ml	1148	3244-902	Flacon	10 stuks
	Skin Lotion 500 ml	1115	3244-431	Flacon met pompje	10 stuks
	Skin Cream 150 ml	4257	3244-472	Tube	10 stuks
Skin Care Oil 250 ml	1176	3244-878	Flacon	10 stuks	
<b>Beschermen</b>					
• TENA Barrier Cream - Beschermt tegen irritaties en neutraliseert geurtjes • TENA Zinc Cream - Kalmeert schrale, geïrriteerde en gevoelige huid		<b>Beschermen</b>			
	Barrier Cream 150 ml	4419	3244-829	Tube	10 stuks
Zinc Cream 100 ml	4294	3244-852	Tube	10 stuks	
<b>Wassen onder de douche of in bad</b>					
• TENA Shampoo & Shower - zachte douchegel en verzorgende shampoo in één		Shampoo & Shower 500 ml	1207	3244-548	Flacon met pompje 10 stuks



**SCA INCONTINENCE CARE EUROPE**

Culliganlaan 1D, B-1831 DIEGEM, België

T +32 (0)2 766 05 52 W www.TENA.be / www.TENANET.be

TENA® is een geregistreerd merk van SCA HYGIENE PRODUCTS

Contacteer ons:  
info@TENA.be

