

BERATUNGSLEITFADEN

TENA ProSkin Pants vs. Slip

TENA ProSkin Pants

(wie herkömmliche Unterhosen zu verwenden)

Für **mobile** und teilmobile Betroffene mit mittelschwerer bis schwerer Inkontinenz

TENA ProSkin Slip

Für teilmobile und **bettlägerige** Betroffene mit schwerer Inkontinenz und Stuhlinkontinenz

Tagsüber mit etwa 150 ml Urinverlust zwischen den Toilettengängen, auch bariatrisch



TENA ProSkin Pants Plus

Größen:
XS, S, M, L, XL, XXL



Tagsüber mit 100 bis 200 ml Urinverlust zwischen den Wechseln



TENA ProSkin Slip Plus

Größen:
XS, S, M, L, XL



Tagsüber mit etwa 200 ml Urinverlust zwischen Toilettengängen



TENA ProSkin Pants Super

Größen:
XS, S, M, L, XL



Nachts mit 100 bis 250 ml Urinverlust



TENA ProSkin Pants Super Night

Größen: M, L



Tagsüber & nachts mit unkontrolliertem Urinverlust, auch bariatrisch



TENA ProSkin Slip Super

Größen:
S, M, L, XL, XXL, 3XL



Tagsüber & nachts mit unkontrolliertem Urinverlust



TENA ProSkin Pants Maxi

Größen:
S, M, L, XL



Tagsüber & nachts mit unkontrolliertem Urinverlust, hoher Bedarf an Sicherheit oder Produktwechsel seltener möglich



TENA ProSkin Slip Maxi

Größen:
S, M, L, XL



TENA ProSkin Pants sind für **mobile Menschen mit Demenz** geeignet, da sie wie Unterwäsche hoch- und runtergezogen werden können und keine neuen Routinen erlernt werden müssen.

TENA ProSkin Slip sind auch für **immobilen Menschen mit Demenz** geeignet. Bei Pflückern (Betroffene, die das Produkt zerreißen) sollte das Produkt von hinten nach vorne angelegt werden. Die demente Person kann dann nicht die Klebestreifen öffnen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Empfehlung: 2 Produkte am Tage / 1 Produkt in der Nacht, um den Schlaf nicht zu stören
- Mittelschwere Inko = 100 bis 200 ml Urinverlust zwischen den Toilettengängen
- Schwere Inko = unkontrollierter Urinabgang
- Fassungsvermögen der Harnblase = 400 bis 500 ml
- Eine Miktion = 250 bis 300 ml Urin

WEITERE TIPPS & TRICKS

zur Anwendung von TENA ProSkin Pants & Slip



Grundsätzlich verzeihen TENA Produkte eher Anlegefehler als andere Inkontinenzprodukte.



TENA Produkte können durch eine besonders hohe Trockenheit sehr lange getragen werden, ohne dass dabei die Haut geschädigt wird.




TENA Produkte sind selten ausgelastet. Sie werden überwiegend aus Gründen des Komforts gewechselt, beispielsweise weil Urin die Produkte schwerer macht.



Für einen optimalen Auslaufschutz müssen Inkontinenzprodukte eng am Körper anliegen. Nur so kann die Flüssigkeit optimal aufgenommen und eingeschlossen werden.



Zum Ausziehen von TENA ProSkin Pants lassen sich die Seitennähte aufreißen.

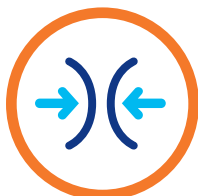

Am häufigsten wird die Plus Saugstärke eingesetzt. Produkte der Saugstärke „Maxi“ sollten nur dann verwendet werden, wenn eine erhöhte Sicherheit notwendig ist, weil z. B. Produktwechsel nicht regelmäßig erfolgen können.

Kontaktieren Sie uns für weiterführende Informationen

 01806 / 121221
Festnetz max. 0,20 €/Gespräch, Mobilfunk max. 0,60 €/Gespräch

 www.tena.de/fachkraefte

 **essity**

TENA
eine Marke von Essity

Essity Germany GmbH
Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim

 **TENA®**