



"Dit lijkt te mooi om waar te zijn."

Manager, Zweden

*"Het zal het continëntieprotocol vervangen. Het geeft me verborgen informatie, de dingen die ik niet kan zien. Ik kan wel zien hoe de huid eruitziet, maar niet dit soort gegevens. Dat is interessant."**

Directeur, instellingshoofd, Duitsland

Bepalen wat uw bewoners echt nodig hebben

Met het TENA Identifi systeem krijgen instellingen toegang tot gedetailleerde en niet eerder bekende informatie over de mictiegewoontes van hun bewoners. Deze informatie is eenvoudig te integreren in de zorgplannen om beter aan de behoeften van individuele cliënten tegemoet te komen.



Log in op het beveiligde TENA Identifi web portal vanaf elke computer om toegang te krijgen tot op maat opgestelde mictierapporten.

Een pak met 12 stuks wegwerp TENA Identifi Sensor Wear is gewoonlijk voldoende voor een mictierapport.



De eenvoudig te reinigen, duurzame TENA Identifi logger volgt de bewoner tijdens het gehele assessment. Hij is oplaadbaar en herbruikbaar.



TENA Identifi

Een nieuw niveau van kennis voor verbeterde individuele zorg



TENA Identifi

Together we make a difference

* Augur: Kwalitatieve concept teststudie in Zweden, het VK en Duitsland, 2012; Sponsor: SCA

Uitgebreide mictierapporten sterk verbeterde zorg

Om de individuele zorgbehoefte van elke bewoner te identificeren en begrijpen, is een continëntiebeoordeling van groot belang. TENA Identifi is een handig systeem waarmee de mictiebeoordeling van een bewoner gedurende 72 uur wordt bijgehouden, waarna een rapport wordt gegenereerd met uitgebreide kennis over patronen en hoeveelheden. Met de gedetailleerde informatie in het mictierapport kan men bepalen wat de meest geschikte absorberende producten zijn, wat de aanbevolen tijden voor toiletbezoek zijn en welke aanpassingen er aan de zorgrouines moeten worden gedaan - dit alles draagt bij tot een meer effectieve continëntiezorg en een verbeterd welzijn voor bewoners.

Comfortabel en discreet

TENA Identifi is gemakkelijk te integreren in routines zonder de bewoner te storen. Tijdens de beoordeling vervangt de sterk absorberende en comfortabele TENA Identifi Sensor Wear het gebruikelijke continëntieproduct of materiaal. Deze wegwerpproducten meten urine door veilig geïntegreerde en dunne, draadachtige sensoren. De stille, herbruikbare TENA Identifi logger die bevestigd is aan de TENA Identifi Sensor Wear registreert het vullen met urine. De informatie wordt automatisch overgebracht naar een veilig web portal waar hij wordt geanalyseerd en omgezet in een mictierapport, waarbij de privacy van de bewoner gewaarborgd blijft.

1 Om een mictierapport te creëren moet een bewoner TENA Identifi Sensor Wear gebruiken met een eraan bevestigde TENA Identifi logger gedurende drie achtereenvolgende dagen (72 uur). TENA Identifi Sensor Wear wordt gewisseld volgens de gebruikelijke routines.



2 Bij elke productwissel wordt de TENA Identifi logger verwijderd en bevestigd aan de nieuwe TENA Identifi Sensor Wear.

3 De gegevens worden automatisch omgezet naar een mictierapport. Het beste resultaat wordt bereikt als belangrijke continëntiegerelateerde gegevens, zoals toiletbezoek, lekkages enz. worden geregistreerd in de TENA Identifi web portal en zo worden meegenomen in het rapport.

Stimuleer continëntie, waardigheid en individuele keuzes

TENA Identifi biedt waardevolle inzichten in de wensen van bewoners op het gebied van hulp bij toiletgebruik, te gebruiken producten en hoe vaak deze verwisseld moeten worden. Op deze manier kunnen zorgverleners individuele zorgplannen opstellen die continëntie stimuleren, de waardigheid vergroten en individuele productkeuzes mogelijk maken. Het juiste absorberende product verhoogt het comfort en voorkomt lekkage en huidirritatie - daarnaast verlaagt het het productverbruik en de impact op het milieu.

TENA Identifi registreert nauwkeurig de daadwerkelijke tijden. Het hieruit resulterende mictiepatroon is waardevol voor het bepalen van effectieve tijden voor toiletbezoek.

Het systeem schat de hoeveelheid bij elke productwissel - een goede basis voor de keuze van het juiste product. Het absorberende product hoeft niet te worden gewogen.

De nieuwe kennis over het mictiepatroon van de bewoner delen met het zorgteam is het beginpunt van verbeterde zorgplannen.



“We doen heel veel beoordelingen met nieuwe bewoners. Indien mogelijk praten we met familieleden over wat ze eten, wanneer ze eten en wat ze lekker vinden enz. Dan beoordelen we de voeding, de huid, de medicatie, de continëntie en andere diagnoses”

Manager, Verenigd Koninkrijk