



NOVINKA TENA STRETCH

ABSORPČNÉ ZALEPOVACIE
NAŤAHOVACIE NOHAVIČKY



NÁVOD NA POUŽÍVANIE




www.tena.sk

TENA STRETCH

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pacienti si môžu zalepovacie naťahovacie nohavičky **jednoducho nasadiť a zapnúť aj v sede** - následne nohavičky vďaka pružným bokom ľahko vytiahnuť. Prinášame tak pacientom väčšiu samostatnosť, komfort a pocit bezpečia pri nosení.

1

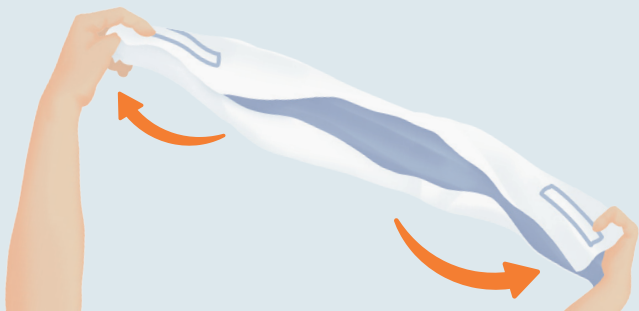

PRVÝ KROK

Rozbaľte zalepovacie naťahovacie nohavičky a vytvarujte ich do **tvaru misky**.

2



DRUHÝ KROK

Zadná část s upevňovacími pásmi patří dozadu. Pokračujte **roztvorením bočných upevňovacích pásov.**

3



TRETÍ KROK

Sadnite si a uchopte rukou **zadný upevňovací pás.**

4



ŠTVRTÝ KROK

Prevlečte zadnú časť pomôcky pod stehno a upevníte **lepiaci pás zvrchu**.

5



PIATY KROK

Zopakujte celý postup aj na **druhej strane**.

6



ŠIESTY KROK

Postavte sa a natiahnite pomôcku nahor cez boky ako bežnú spodnú bielizeň a uistite sa, že upevňovacie **pásky sa neprekrývajú**.

7



SIEDMY KROK

Prispôsobte pomôcku pomocou elastických pásov tak, aby poskytovala maximálne pohodlie a ochranu. Uistite sa, že v oblasti podbruška nie je zrolovaná a **dobre prilieha k telu.**

8



ÔSMY KROK

Počas dňa ich môžete opakovane jednoducho **sťahovať a natáľovať bez rozopínania**, ako bežnú spodnú bielizeň bez potreby vyzliecť si kompletne oblečenie.

PRODUKTY TENA STRETCH SÚ NAVRHNUTÉ PRE KOMFORT POČAS CELÉHO DŇA - POČAS DŇA I POČAS NOCI .

Pre optimálnu ochranu ich odporúčame správne kombinovať podľa potreby.

ZALEPOVACIE NAĎAHOVACIE NOHAVIČKY

NOVINKA

Názov produktu		Obvod bokov (v cm)	Absorpcia (v ml)	ŠÚKL kód
TENA Stretch Day Super M	7 	86-116	2500	B9663A
TENA Stretch Day Super L	7 	103-140	2500	B9664A
TENA Stretch Night Super M	7  	86-116	2600	B9665A
TENA Stretch Night Super L	7  	103-140	2800	B9666A



Inkontinenčné pomôcky TENA Stretch sú zdravotnícke pomôcky určené pre dospelých pri strednom až ťažkom úniku moču. Pozorne si prečítajte informácie na obale. O správnom použití sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.



essity

TENA je značka
spoločnosti Essity

