

# TENA Saugstärkenübersicht



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Slipinlagen		Einlagen			Einlagen+/Schutzunterwäsche				
<b>TENA Lady</b>	Discreet Mini Magic	Discreet Ultra Mini	Discreet Mini	Discreet Mini Plus	Discreet Normal	Extra	Extra Plus	Maxi	Discreet Maxi Night	
<b>TENA Comfort Mini</b>					Plus	Extra	Super			
<b>TENA Silhouette</b>						Normal Blanc M/L	Plus Crème/Noir M/L			
<b>TENA MEN</b>		Extra Light			Level 1	Level 2	Level 3	Active Fit Pants M/L	Premium Fit M/L	

	1	2	3	4	5	6	7
Saugstärke	Discreet	Normal	Plus	Extra	Super	Maxi	Ultima
<b>TENA Pants / Pants Bariatric</b>	M/L	S/M/L/XL	XS/S/M/L/XL/XXL		S/M/L/XL	M/L/XL	
<b>TENA Flex</b>			S/M/L/XL		S/M/L/XL	S/M/L/XL	
<b>TENA Slip / Slip Bariatric</b>			XS/S/M/L/XL		S/M/L/XL/XXL/3XL	S/M/L/XL	
<b>TENA Slip Original</b>			S/M/L		M	M/L	
<b>TENA Comfort</b>							Zur sicheren Fixierung von TENA Comfort und TENA Comfort Original TENA Fix XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL TENA Fix Bariatric 4XL/5XL oder TENA Fix Cotton Special XS/S/M/L/XL/XXL
<b>TENA Comfort Original</b>							



## Inkontinenzversorgung mit TENA für Institutionen

Produktkatalog Januar 2020



**Infos, Service und Beratung:**  
Die neuesten Produktbilder zum Download sowie unterstützende Unterlagen und Muster auf [www.TENAnet.at](http://www.TENAnet.at)

Wir helfen gerne weiter!  
TENA Kundenservice 01 / 89 90 17 24






# TENA Einlagen für Frauen

## TENA Comfort Mini


Alle TENA Comfort Mini Produkte haben ein weiches atmungsaktives Außenmaterial, das die Luft zirkulieren lässt. So wird Feuchtigkeit vermieden und eine gesunde Haut gefördert. Für einen hohen Grad an Sicherheit, Komfort und Frischegefühl.

- Geruchs-Neutralisierer verhindern unerwünschte Gerüche
- Schnell wirkender hochabsorbierender Saugkern für hohen Auslaufschutz
- Weiches, textiltartiges und atmungsaktives Material fördert die Hautgesundheit

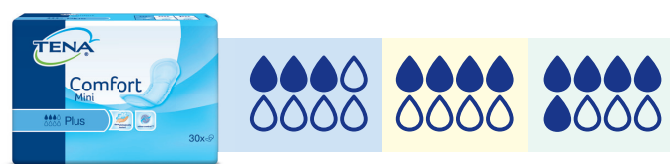


## TENA Discreet Slipereinlagen

Speziell für Frauen, die keinen größeren Schutz benötigen. Dank microPROTEX™ Technologie werden Gerüche und Flüssigkeit diskret eingeschlossen.

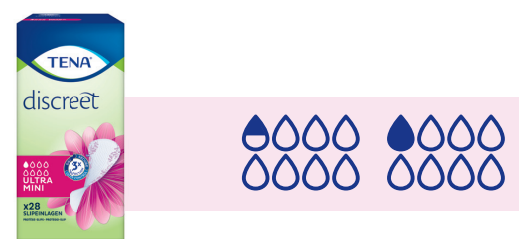


## TENA Lady Discreet Einlagen

In drei Größen und Saugstärken für einen wirkungsvollen Auslaufschutz. TENA Lady Discreet Einlagen passen sich perfekt dem Körper an und geben Frauen ein sicheres, verlässliches Gefühl.

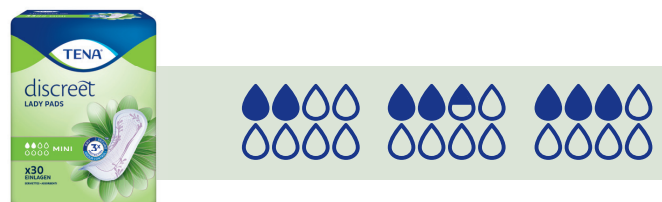

## TENA Lady Einlagen+

TENA Lady Einlagen+ sind für größere Mengen Flüssigkeit geeignet, dabei angenehm zu tragen und absolut diskret. Bis zu 100% Auslaufschutz\* geben Betroffenen die Sicherheit, die sie brauchen.

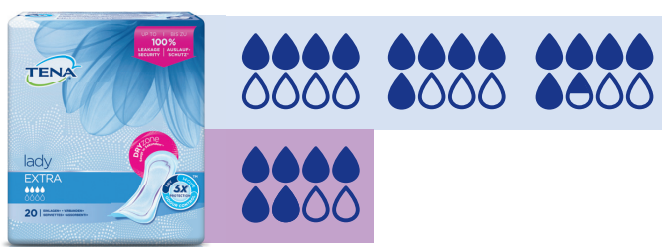

## Wie können TENA Einlagen für Frauen Sie unterstützen?



**Zeitersparnis:**  
Einlagen sind leicht anlegbar und ermöglichen aktiven Personen mehr Flexibilität und Eigeninitiative



**Mehr Wohlbefinden:**  
Schutz und Diskretion bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche




**Hautgesundheit**  
wird durch Atmungsaktivität gefördert


\* Basierend auf einem Anwendungstest zur Ermittlung der Anzahl nicht ausgelaufener Produkte.

# Anlegehilfe

## TENA Einlagen für Frauen

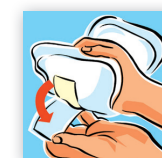

1. Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Einlagenrückseite entfernen, Einlage der Länge nach falten, um eine Schalenform zu erhalten

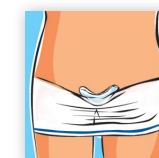

2. Einlage mit der Klebeseite nach unten in die Hose legen



3. Hose fixieren

# Artikeldaten

TENA Comfort Mini		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Comfort Mini Plus	76 14 25	6 IV = 180 30
TENA Comfort Mini Extra	76 15 31	8 IV = 240 30
TENA Comfort Mini Super	76 17 17	6 IV = 180 30
TENA Lady Discreet		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Discreet Mini Magic	76 10 64	6 IV = 204 34
TENA Discreet Ultra Mini	76 11 74	10 IV = 280 28
TENA Lady Discreet Mini	76 02 63	6 IV = 180 30
TENA Lady Discreet Mini Plus	76 03 22	6 IV = 120 20
TENA Lady Discreet Normal	76 04 86	12 IV = 288 24
TENA Lady Extra	76 05 69	12 IV = 240 20
TENA Lady Extra Plus	76 06 23	6 IV = 96 16
TENA Lady Maxi	76 09 27	12 IV = 144 12
TENA Lady Discreet Maxi Night	76 09 21	6 IV = 72 12

Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe, \* IV = Innenverpackung

# TENA MEN

## Das richtige Produkt für jede Situation




TENA MEN Produkte sind genau auf die männliche Anatomie zugeschnitten und bieten perfekten Schutz bei jeder Form von Harnverlust.



Extra Light

## 100% diskret. 100% so sicher: TENA MEN Level 1-3

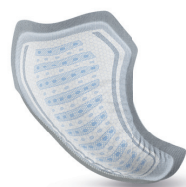

Die perfekte Wahl für Männer, die mehr als ein paar Tröpfchen verlieren. Die Protpektoren lassen sich einfach in die Unterwäsche einkleben und bieten Schutz, genau dort, wo er benötigt wird.



## Überzeugende Sicherheit, attraktive Optik: TENA MEN Pants

TENA MEN Schutzunterwäsche gibt es als TENA MEN Active Fit Pants sowie als TENA MEN Premium Fit Protective Underwear in besonders unterwäsche-ähnlicher Optik. TENA MEN Pants eignen sich bei mittleren bis großen Mengen Harn – am Tag und in der Nacht.



Plus



Maxi



## Wie kann TENA MEN Sie unterstützen?



Mehr Wohlbefinden:

Erhält Maskulinität und Würde. Bessere Akzeptanz für unterwäscheartige Produkte bei aktiven oder demenziell veränderten Personen<sup>1</sup>




Bessere Mobilität:


Erleichtert die Unabhängigkeit und die Mobilisation<sup>2</sup>

# Anlegehilfe


## TENA MEN

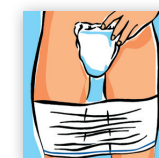

1. Legen Sie Penis und Hoden in die Einlage, Einlage der Länge nach falten, um eine Schalenform zu erhalten

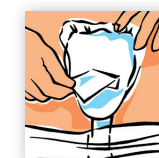


2. Entfernen Sie den Papierklebestreifen, so dass die Klebefläche freigelegt wird

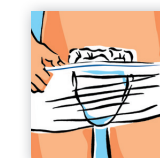


3. Ziehen Sie die Unterwäsche hoch


## TENA MEN Pants

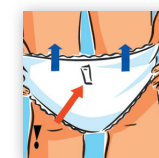

1. Ziehen Sie die Pants nach oben

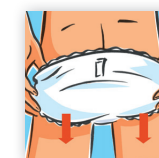

2. Ziehen Sie die Pants wie normale Unterwäsche über die Beine

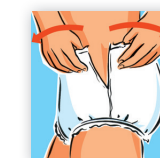

3. Zum Ausziehen können Sie die Seitennähte aufreißen

# Artikeldaten

TENA MEN		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV *
TENA MEN Protective Shield, Extra Light	75 04 03	8 IV = 112 14
TENA MEN Level 1, Light	75 06 51	6 IV = 144 24
TENA MEN Level 2, Medium	75 07 76	6 IV = 120 20
TENA MEN Level 3, Super	75 08 30	6 IV = 96 16
TENA MEN Pants		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV *
TENA MEN Active Fit Pants, Größe M Hüfte 75-105 cm	77 25 12	4 IV = 48 12
TENA MEN Active Fit Pants, Größe L Hüfte 95-130 cm	77 26 10	4 IV = 40 10
TENA MEN Premium Fit, Protective Underwear, Größe M Hüfte 71-102 cm	79 83 08	4 IV = 48 12
TENA MEN Premium Fit, Protective Underwear, Größe L Hüfte 83-120 cm	79 83 06	4 IV = 40 10

Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe, \* IV = Innenverpackung

<sup>1</sup> Studie zur Aufdeckung von Problemfeldern FR, UK, NL, SE und US, Jun 2010.  
<sup>2</sup> Pants in Institutionen RMDN, NH in Italien, Nov 2011.



# TENA Pants

## Geeignet für mobile Personen, um Selbstständigkeit zu erhalten

Folgende Faktoren sind Pflegekräften bei der Wahl des richtigen Produktes wichtig: hohe Qualität, maximaler Auslaufschutz, leicht anwendbar<sup>1</sup> und komfortabel<sup>1</sup>. TENA Pants wurden entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen.

TENA Pants dehnen sich körpergerecht wie Unterwäsche und schmiegen sich an die Körperkonturen an. Sie sorgen für einen wirklich körpernahen Sitz und bieten damit Komfort und Sicherheit. Pants eignen sich bei mittleren bis großen Mengen Harn – am Tag und in der Nacht.

- Dünnes, atmungsaktives Material für gesündere Haut und mehr Komfort
- Integrierte Barrieren für maximalen Auslaufschutz
- FeelDry™ Advanced Technologie leitet auch große Mengen Urin sehr schnell in den Produktkern
- Geruchs-Neutralisierer kontrolliert Gerüche für extra Wohlbefinden



## Weitere, geschlechtsspezifische Pants-Produkte von TENA:

TENA Silhouette: Feminine Einweghosen in verschiedenen Farben und Schnitten.

TENA MEN Active Fit Pants und Premium Fit Protective Underwear: Pants in maskulinen Farben, spezifisch auf männliche Anatomie ausgerichtet.



## Wie kann TENA Pants Sie unterstützen?



Mehr Wohlbefinden:

Verbesserung des Komforts für aktive Personen, besonders geeignet für demenziell veränderte Betroffene<sup>2</sup>




Bessere Mobilität:

Erleichtert die Unabhängigkeit und die Mobilisation<sup>3</sup>


1 TENA Pants Test der Erfolgsrate in NH, Dez 2010.  
2 Studie zur Aufdeckung von Problemfeldern in FR, UK, NL, SE und US, Jun 2010.  
3 Pants in Institutionen RMDN, NH in Italien, Nov 2011.

# Anlegehilfe

## TENA Pants

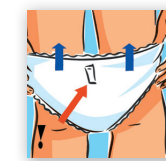

1. Ziehen Sie die Pants nach oben

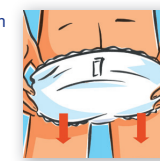

2. Ziehen Sie die Pants wie normale Unterwäsche über die Beine



3. Zum Ausziehen können Sie die Seitennähte aufreißen

## Artikeldaten

♀ ♂	TENA Pants	
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Pants Discreet M Hüfte 75-100 cm	79 23 00	4 IV = 48 12
TENA Pants Discreet L Hüfte 95-125 cm	79 33 00	4 IV = 40 10
TENA Pants Normal S Hüfte 65-85 cm	79 14 15	4 IV = 60 15
TENA Pants Normal M Hüfte 80-110 cm	79 15 28	4 IV = 72 18
TENA Pants Normal L Hüfte 100-135 cm	79 16 28	4 IV = 72 18
TENA Pants Normal XL Hüfte 120-160 cm	79 17 15	6 IV = 90 15
TENA Pants Plus XS Hüfte 50-70 cm	79 23 14	4 IV = 56 14
TENA Pants Plus S Hüfte 65-85 cm	79 24 15	4 IV = 56 14
TENA Pants Plus M Hüfte 80-110 cm	79 25 49	4 IV = 56 14
TENA Pants Plus L Hüfte 100-135 cm	79 26 14	4 IV = 56 14
TENA Pants Plus XL Hüfte 120-160 cm	79 27 15	4 IV = 48 12
TENA Pants Bariatric Plus XXL Hüfte 150-203 cm	79 28 62	4 IV = 48 12
TENA Pants Super S Hüfte 65-85 cm	79 34 13	4 IV = 48 12
TENA Pants Super M Hüfte 80-110 cm	79 35 20	4 IV = 48 12
TENA Pants Super L Hüfte 100-135 cm	79 36 14	4 IV = 48 12
TENA Pants Super XL Hüfte 120-160 cm	79 37 13	4 IV = 48 12
TENA Pants Maxi M Hüfte 80-110 cm	79 45 12	4 IV = 40 10
TENA Pants Maxi L Hüfte 100-135 cm	79 46 23	4 IV = 40 10
TENA Pants Maxi XL Hüfte 120-160 cm	79 47 60	4 IV = 40 10
TENA Silhouette Normal Blanc M Hüfte 75-105 cm	79 55 12	6 IV = 72 12
TENA Silhouette Normal Blanc L Hüfte 95-130 cm	79 56 10	6 IV = 60 10
TENA Silhouette Plus Crème M Hüfte 75-105 cm	78 25 12	4 IV = 48 12
TENA Silhouette Plus Crème L Hüfte 95-130 cm	78 26 10	4 IV = 40 10
TENA Silhouette Plus Noir M Hüfte 75-105 cm	70 30 87	4 IV = 36 9
TENA Silhouette Plus Noir L Hüfte 95-130 cm	70 30 88	4 IV = 32 8
TENA MEN Active Fit Pants, Größe M Hüfte 75-105 cm	77 25 12	4 IV = 48 12
TENA MEN Active Fit Pants, Größe L Hüfte 95-130 cm	77 26 10	4 IV = 40 10
TENA MEN Premium Fit Protective Underwear, Größe M, Hüfte 71-102 cm	79 83 08	4 IV = 48 12
TENA MEN Premium Fit Protective Underwear, Größe L, Hüfte 83-120 cm	79 83 06	4 IV = 40 10

Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe, \* IV = Innenverpackung



# TENA Flex

## Vorlage mit flexiblem Hüftbund für einfache und schnelle Wechsel

TENA Flex wurde speziell für leichtere und ergonomischere Produktwechsel entwickelt. Das innovative Produkt unterstützt die Pflegekraft beim rückschonenden Arbeiten.<sup>1</sup>



TENA Flex erhält weiterhin Würde und Komfort der Betroffenen und vereinfacht das Toiletentraining. Weiterhin bedeckt das Produkt weniger Fläche der Haut und reduziert so das Risiko von Hautirritationen. So fallen bis zu 65% weniger Kosten für Hautpflege aufgrund der Verringerung von Hautirritationen an.<sup>2</sup>

- Innovativer, anatomisch geformter Doppel-Saugkern mit FeelDry™ Advanced Technologie hält länger trocken: Auch große Mengen Harn werden schnell in den Produktkern geleitet. Das bedeutet mehr Komfort und ist ein bedeutender Schritt zu besserer Hautgesundheit
- ConfioAir™ ermöglicht der Haut zu atmen: Atmungsaktive und textilähnliche Rückseite erhält die Trockenheit für Komfort und Hautgesundheit
- Integrierter ComfiStretch-Hüftbund. Mehrfach anpassbare Fixierung für leichtere, ergonomische Produktwechsel
- Auslaufbarrieren und elastische Bein elastiken bieten verbesserten Auslaufschutz
- Nässeindikator: Der Nässeindikator an der Außenseite des Produkts färbt sich von Gelb auf Blau, wenn es Zeit für den Wechsel ist
- Geruchs-Neutralisierer verhindern unerwünschte Gerüche und geben ein Gefühl von Frische und Würde

## Wie kann TENA Flex Sie unterstützen?



Ergonomie:

Senkt Belastungen im unteren Rückenbereich




Zeitersparnis:

Reduziert die Zeit für Produktwechsel aufgrund des einfachen Handlings (bis zu 45 Stunden pro Woche)<sup>3</sup>. Somit bleibt mehr Zeit für andere Pflegeaufgaben




# Anlegehilfe

## TENA Flex

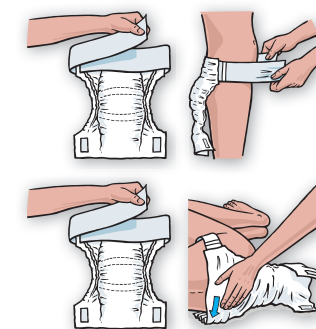


1.-2. Öffnen Sie zuerst den Hüftbund am Produkt. Falten Sie TENA Flex der Länge nach, sodass eine Schalenform entsteht. Legen Sie den Bund um die Hüfte und schließen Sie ihn mit dem Klettverschluss

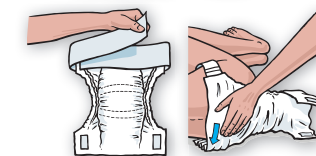

1.-2. Falten Sie aus der komplett aufgefalteten Vorlage eine Schalenform. Drehen Sie den Betroffenen auf die Seite und ziehen Sie den Hüftbund unterhalb der Hüfte durch. Drehen Sie den Betroffenen auf den Rücken und ziehen Sie die Vorlage zwischen den Beinen hindurch



3. Ziehen Sie die Vorderseite der Vorlage nach oben Richtung Hüfte und richten Sie sie an den Seiten aus

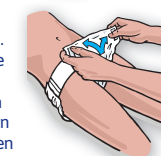

3. Dehnen Sie die Vorderseite der Vorlage in Richtung Hüfte und zu beiden Seiten aus



4. Befestigen Sie die Klettverschlüsse der Vorlage am Hüftbund und drücken Sie diese fest. Kontrollieren Sie die Verschlüsse mehrfach und ob die Vorlage richtig sitzt



4. Befestigen Sie die Klettverschlüsse mit sanftem Druck und glätten Sie mögliche Hautfalten in der Leiste. Kontrollieren Sie die Verschlüsse mehrfach und ob die Vorlage richtig sitzt

# Artikeldaten

TENA Flex		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Flex Plus S Hüfte 61-87 cm	72 31 30	3 IV = 90 30
TENA Flex Plus M Hüfte 71-102 cm	72 32 30	3 IV = 90 30
TENA Flex Plus L Hüfte 83-120 cm	72 33 30	3 IV = 90 30
TENA Flex Plus XL Hüfte 105-153 cm	72 34 30	3 IV = 90 30
TENA Flex Super S Hüfte 61-87 cm	72 41 30	3 IV = 90 30
TENA Flex Super M Hüfte 71-102 cm	72 42 30	3 IV = 90 30
TENA Flex Super L Hüfte 83-120 cm	72 43 30	3 IV = 90 30
TENA Flex Super XL Hüfte 105-153 cm	72 44 30	3 IV = 90 30
TENA Flex Maxi S Hüfte 61-87 cm	72 51 22	3 IV = 66 22
TENA Flex Maxi M Hüfte 71-102 cm	72 52 22	3 IV = 66 22
TENA Flex Maxi L Hüfte 83-120 cm	72 53 22	3 IV = 66 22
TENA Flex Maxi XL Hüfte 105-153 cm	72 54 21	3 IV = 63 21

Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe, \* IV = Innenverpackung

1. 114 Bewohner, 119 Pflegepersonal in drei verschiedenen Häusern in Auckland; TENA Flex Evaluation, Neuseeland, Dezember 2009, Daten liegen vor.  
 2. Durchschnittliche Kosten eines Hautpflegeprodukts pro Einwohner pro Tag. Hautpflegekosten basierend auf den von EBOS bereitgestellten Hautpflegeproduktkosten; TENA Flex Evaluation, Neuseeland, Dezember 2009, Daten liegen vor.  
 3. Voraussichtliche Einsparungen pro 100 Einwohner, die Inkontinenzpflege benötigen; TENA Flex Evaluation, Neuseeland, Dezember 2009, Daten liegen vor.



# TENA Slip

## Auch geeignet für immobile Personen

TENA Slip sind auch bei immobilen Betroffenen leicht anzulegen und individuell und mehrmals anzupassen, um perfekten Sitz zu garantieren. Der praktische Nässeindikator an der Außenseite des Produkts zeigt dabei an, ob und wann es Zeit zum Wechsel ist.

Auch Hautgesundheit kann im Rahmen der Pflege eine echte Herausforderung sein. TENA Slip mit ConfioAir™ sind atmungsaktiv und ermöglichen Ihnen, einen hautfreundlicheren Inkontinenzschutz zu bieten.

- Schnell wirkender, hochabsorbierender Saugkern: FeelDry™ Advanced Technologie leitet auch große Mengen Harn sehr schnell in den Produktkern. Das bedeutet mehr Komfort und ist ein bedeutender Schritt zu besserer Hautgesundheit
- ConfioAir™ ermöglicht der Haut zu atmen: Atmungsaktive und textilähnliche Rückseite erhält die Trockenheit für Komfort und Hautgesundheit
- Breite Klettverschlüsse: Vielfach anpassbar für einen perfekten Sitz
- Auslaufbarrieren und elastische Beinellastiken bieten verbesserten Auslaufschutz
- Nässeindikator: Der Nässeindikator an der Außenseite des Produkts färbt sich von Gelb auf Blau, wenn es Zeit für den Wechsel ist
- Geruchs-Neutralisierer verhindern unerwünschte Gerüche und geben ein Gefühl von Frische und Würde



## Wie kann TENA Slip Sie unterstützen?



Hautgesundheit:  
Mehr Wohlbefinden durch atmungsaktives ConfioAir™ Material



Bessere Nachtruhe:  
Auslaufsicherer Schutz für unruhige Personen

# Anlegehilfe

## TENA Slip



# Artikeldaten

♀ ♂ ♿		TENA Slip		♿
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*		
TENA Slip Plus XS Hüfte 49-74 cm	71 04 30	3 IV = 90 30		
TENA Slip Plus S Hüfte 56-85 cm	71 05 30	3 IV = 90 30		
TENA Slip Plus M Hüfte 73-122 cm	71 06 30	3 IV = 90 30		
TENA Slip Plus L Hüfte 92-144 cm	71 07 30	3 IV = 90 30		
TENA Slip Plus XL Hüfte 120-160 cm	71 10 21	3 IV = 90 30		
TENA Slip Super S Hüfte 56-85 cm	71 11 30	3 IV = 90 30		
TENA Slip Super M Hüfte 73-122 cm	71 12 28	3 IV = 84 28		
TENA Slip Super L Hüfte 92-144 cm	71 14 28	3 IV = 84 28		
TENA Slip Super XL Hüfte 120-160 cm	71 10 23	3 IV = 84 28		
TENA Slip Bariatric Super XXL Hüfte 163-178cm	61 49 0	2 IV = 64 32		
TENA Slip Bariatric Super 3XL Hüfte 175-244cm	61 39 1	4 IV = 32 8		
TENA Slip Maxi S Hüfte 56-85 cm	71 08 24	3 IV = 72 24		
TENA Slip Maxi M Hüfte 73-122 cm	71 09 24	3 IV = 72 24		
TENA Slip Maxi L Hüfte 92-144 cm	71 10 24	3 IV = 72 24		
TENA Slip Maxi XL Hüfte 120-160 cm	71 10 26	3 IV = 72 24		

Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe, \* IV = Innenverpackung



# TENA Comfort

## Die vielseitige Vorlage für alle Formen der Inkontinenz

TENA Comfort hat eine einzigartige Rundum-Barriere, die eine Schale formt für schnelles, sicheres Aufsaugen und verbesserten Auslaufschutz. Ihr hochabsorbierender Saugkern leitet auch große Mengen Harn schnell in den Produktkern und sorgt so für längere Trockenheit.

TENA Comfort ist komplett atmungsaktiv, dermatologisch getestet und unterstützt die Hautgesundheit. Das textilähnliche Material fühlt sich sehr weich an.

- Schnell wirkender, hochabsorbierender Saugkern: FeelDry™ Advanced Technologie leitet auch große Mengen Harn sehr schnell in den Produktkern. Das bedeutet mehr Komfort und ist ein bedeutender Schritt zu besserer Hautgesundheit
- ConfioAir™ ermöglicht der Haut zu atmen: Atmungsaktive und textilähnliche Rückseite erhält die Trockenheit für Komfort und Hautgesundheit
- Anatomische Passform: Rundum-Barriere, die eine Schale formt für schnelles, sicheres Aufsaugen
- Nässeindikator: Der Nässeindikator an der Außenseite des Produkts färbt sich von Gelb auf Blau, wenn es Zeit für den Wechsel ist
- Geruchs-Neutralisierer verhindern unerwünschte Gerüche und geben ein Gefühl von Frische und Würde



## Wie kann TENA Comfort Sie unterstützen?



**Zeitersparnis:**  
Die Vorlagen mit Fixierhose sind leicht anlegbar und ermöglichen aktiven Menschen mehr Flexibilität und Eigeninitiative



**Bessere Mobilität:**  
Mehr Flexibilität und Eigeninitiative für aktive Betroffene



**Bessere Nachtruhe**  
durch höhere Saugstärken

# Anlegehilfe

## TENA Comfort



# Artikeldaten

TENA Comfort		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Comfort Normal	75 27 42	3 IV = 126 42
TENA Comfort Plus	75 28 46	2 IV = 92 46
TENA Comfort Extra	75 30 40	2 IV = 80 40
TENA Comfort Super	75 81 36	2 IV = 72 36
TENA Comfort Maxi	75 91 28	2 IV = 56 28
TENA Comfort Ultima	75 92 05	4 IV = 68 17

Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe, \* IV = Innenverpackung



# TENA Fix

## Nahtlose waschbare und wiederverwendbare Fixierhosen

### TENA Fix

Die unterwäscheartigen Fixierhosen für exzellenten Komfort unterstützen den Auslaufschutz, indem sie für sichere Fixierung und perfekten Sitz von TENA Inkontinenzprodukten sorgen. Sie behalten ihre Form auch nach mehrmaligem Waschen.

Das nahtlose, weiche und elastische Material hilft dabei, Hautirritationen zu vermeiden.

- Breite Hüft- und Beinlastiken garantieren hohen Tragekomfort
- Waschbar sowie wäschetrocknerfest
- Sieht aus wie normale Unterwäsche, verbirgt die Einlage für mehr Würde
- Waschbar bis 60 °C\*
- Haltbar bis zu 60 Wäschen (40 bei Industrewäschen)

### TENA Fix Cotton Special

Aufgrund ihres hohen Baumwollanteils fühlt sie sich an wie Unterwäsche. Waschbar bis 95 °C.\*

### TENA Fix Original

Netz hose für guten Auslaufschutz mit anatomischem Sitz.



## Wie kann TENA Fix Sie unterstützen?



**Mehr Wohlbefinden:**  
Nahtlose Form und weiche Elastiken erhöhen den Komfort



**Zeitersparnis:**  
Die Fixierhosen sind leicht anlegbar

\* Im Netzwäschebeutel, im Schonwaschgang

# Artikeldaten

<span>♀</span> <span>♂</span> <b>TENA Fix</b>		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Fix XS Hüfte 50-65 cm	75 40 49	20 IV = 100 5
TENA Fix S Hüfte 60-80 cm	75 40 23	20 IV = 100 5
TENA Fix M Hüfte 70-100 cm	75 40 24	20 IV = 100 5
TENA Fix L Hüfte 85-120 cm	75 40 25	20 IV = 100 5
TENA Fix XL Hüfte 100-140 cm	75 40 26	20 IV = 100 5
TENA Fix XXL Hüfte 120-160 cm	75 40 27	20 IV = 100 5
TENA Fix XXXL Hüfte 130-180 cm	75 40 47	20 IV = 100 5
TENA Fix Bariatric 4XL Hüfte 140-200 cm	75 40 67	20 IV = 100 5
TENA Fix Bariatric 5XL Hüfte 160-230 cm	75 40 68	20 IV = 100 5
<span>♀</span> <span>♂</span> <b>TENA Fix Cotton Special</b>		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Fix Cotton Special XS Hüfte 60-70 cm	75 66 02	45 IV = 45 1
TENA Fix Cotton Special S Hüfte 65-85 cm	75 66 03	34 IV = 34 1
TENA Fix Cotton Special M Hüfte 70-90 cm	75 66 04	34 IV = 34 1
TENA Fix Cotton Special L Hüfte 80-100 cm	75 66 06	28 IV = 28 1
TENA Fix Cotton Special XL Hüfte 95-120 cm	75 66 07	28 IV = 28 1
TENA Fix Cotton Special XXL Hüfte 110-130 cm	75 66 08	24 IV = 24 1
<span>♀</span> <span>♂</span> <b>TENA Standard Netz hosen / TENA Fix Original</b>		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
Fixierhose Universal	75 40 70	1 IV = 250 250
TENA Fix Original S	75 54 02	5 IV = 125 25
TENA Fix Original M	75 55 01	5 IV = 125 25
TENA Fix Original L	75 56 12	5 IV = 125 25

Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe, \* IV = Innenverpackung



# TENA Bariatric

## Würdevolle Versorgung bei Adipositas

Starkes Übergewicht macht die Pflege von Betroffenen schwieriger und zeitintensiver. Das TENA Bariatric Sortiment unterstützt die Pflege adipöser Verwender mit besonders großen Größen und macht so die Anlage einfacher und schneller.



Da stark übergewichtige Menschen eher zu Hautproblemen neigen, ist auch das TENA Bariatric Sortiment komplett atmungsaktiv und sorgt bei Betroffenen für mehr Komfort und Wohlbefinden.



Super

XXL Hüfte 163-178 cm  
3XL Hüfte 175-244 cm



Ultima

73,5 cm lang, 24,5 cm breit



4XL Hüfte 140-200 cm  
5XL Hüfte 160-230 cm



Plus

XXL Hüfte 150-203 cm

## TENA Slip Bariatric Super

Für mehr Komfort und Sicherheit: größere Größen und bessere Passform

## TENA Comfort Ultima & TENA Fix Bariatric

Die klassische Vorlage, jetzt noch größer: kombiniert mit TENA Fix Bariatric in besonders großen Größen

## TENA Pants Bariatric Plus

Die bewährte TENA Pants, jetzt auch in XXL



## Wie kann TENA Bariatric Sie unterstützen?



**Mehr Wohlbefinden:**  
Verbesserung des Komforts adipöser Betroffener,  
Erhalt der Würde



**Hautgesundheit:**  
Mehr Wohlbefinden und Kostenersparnis bei der  
Hautpflege

# Artikeldaten

<b>TENA Slip</b>		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Slip Bariatric Super XXL Hüfte 163-178 cm	61 49 0	2 IV = 64 32
TENA Slip Bariatric Super 3XL Hüfte 175-244 cm	61 39 1	4 IV = 32 8
<b>TENA Comfort</b>		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Comfort Ultima	75 92 05	4 IV = 68 17
<b>TENA Fix</b>		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Fix Bariatric 4XL Hüfte 140-200 cm	75 40 67	20 IV = 100 5
TENA Fix Bariatric 5XL Hüfte 160-230 cm	75 40 68	20 IV = 100 5
<b>TENA Pants</b>		
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Pants Bariatric Plus XXL Hüfte 150-203 cm	79 28 62	4 IV = 48 12

Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe, \* IV = Innenverpackung

# TENA Hautpflege

Ein Programm für alle Hygiene-Routinen



**Körperreinigung**  
Pflegend reinigen ohne zusätzliches Wasser

## TENA Wet Wash Glove

Weiche, mit Reinigungslotion versehene Waschhandschuhe für die Ganzkörperreinigung ohne Wasser und Seife.



## TENA Shampoo Cap

Für die Haarwäsche ohne zusätzliches Wasser. Haube ist mit einem speziellen Shampoo versehen, das nicht ausgespült werden muss.



Vorteil: Man braucht kein Nackenbecken und somit kann das Bett nicht nass werden.

1 Stück



**Intimreinigung**  
Pflegend reinigen ohne zusätzliches Wasser

## TENA Wet Wipe, Wash Cream, Wash Mousse

Vorbeugende Hautreinigung und -pflege mit cremiger 3-in-1-Formel. Fördert die Hautgesundheit, indem sie reinigt, pflegt und schützt (als Creme, Mousse oder feuchte Pflögetücher).



## TENA Wash Glove

Komfortable, hautfreundliche Einweg-Handschuhe für die sanfte Reinigung.

175/200 Stück



## TENA Soft Wipes

Ultra-weiche, dicke Waschtücher.

135 Stück



# Artikeldaten

TENA Wash Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Wash Cream, Pumpflasche	42 42	500 ml	10 IV = 10 1
TENA Wash Cream, Pumpflasche	42 49	1000 ml	8 IV = 8 1
TENA Wash Mousse			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Wash Mousse, Spraydose	65 70	400 ml	15 IV = 15 1
TENA Wet Wipe			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Wet Wipe	79 97	32 x 19 cm	12 IV = 576 48
TENA Soft Wipes			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Soft Wipe	74 07 00	19 x 30 cm	8 IV = 1080 135
TENA Soft Wipe	74 07 10	30 x 32 cm	8 IV = 1080 135
TENA Wash Gloves			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Wash Glove	74 04 00	25 x 16 cm	6 IV = 1200 200
TENA Wash Glove, mit Folie	74 05 00	25 x 16 cm	6 IV = 1050 175
TENA Wet Wash Gloves			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Wet Wash Glove, milder Duft	11 16	23 x 15 cm	30 IV = 240 8
TENA Wet Wash Glove, milder Duft	11 32	23 x 15 cm	45 IV = 225 5
TENA Wet Wash Glove, parfümfrei	11 58	23 x 15 cm	30 IV = 240 8
TENA Wet Wash Glove, parfümfrei	11 62	23 x 15 cm	45 IV = 225 5
TENA Shampoo Cap			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Shampoo Cap	10 42	1	30 IV = 30 1

\* IV = Innenverpackung



# TENA Hautpflege



**Körperreinigung**  
Traditionell reinigen mit Wasser

## TENA Shampoo & Shower

Ein mildes Gel mit Provitamin B5 zum Duschen und Haarewaschen, speziell für die empfindliche Haut und das Haar.

500 ml



**Hautpflege**  
Feuchtigkeitspflege

## TENA Body Lotion

Leicht parfümierte Lotion mit natürlichen Feuchtigkeitsspendern, mit Rapsöl und Provitamin B5.

500 ml



## TENA Body Cream

Ergiebige Creme für sehr trockene, empfindliche Haut, mit Rapsöl und Glycerin.

150 ml



**Hautschutz**  
Schutz

## TENA Barrier Cream

Sanfte, transparente Creme, die eine starke, wasserabweisende Barriere gegen Reizstoffe bietet.

150 ml



## TENA Zinc Cream

Extra Schutz für gereizte und empfindliche Haut mit Zinkoxid (10%) und Vitamin E.

100 ml



# Artikeldaten

TENA Shampoo & Shower			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Shampoo & Shower, Pumpflasche	12 07	500 ml	10 IV = 10 1
TENA Body Lotion			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Body Lotion, Pumpflasche	11 15	500 ml	10 IV = 10 1
TENA Body Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Body Cream, Tube	42 57	150 ml	10 IV = 10 1
TENA Barrier Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Barrier Cream, parfümfrei, Tube	44 19	150 ml	10 IV = 10 1
TENA Zinc Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Zinc Cream, parfümfrei, Tube	42 94	100 ml	10 IV = 10 1

\* IV = Innenverpackung

## Wie kann die TENA Hautpflege Sie unterstützen?



Hautgesundheit:  
Mehr Wohlbefinden für Betroffene und Kostenersparnis bei der Hautpflege



Zeitersparnis und weniger Arbeitsaufwand:  
durch innovative, komfortable Ganzkörper-Pflegerroutinen

# TENA ProSkin

## Ein neuer Pflegeansatz für gesunde Haut

Gesunde Haut trägt maßgeblich zur Lebensqualität von Betroffenen bei. Als Experte für Inkontinenz- und Hautpflege möchte TENA Sie dabei unterstützen, hier die beste Versorgung zu bieten.

Deshalb haben wir unter dem Namen ProSkin einen einfachen 3-stufigen Ansatz für gesunde Haut entwickelt:



**Stufe 1:** Atmungsaktive TENA Inkontinenzprodukte bieten Schutz und halten die Haut trocken – zum Beispiel TENA Pants, TENA Flex, TENA Slip und TENA Comfort.

**Stufe 2:** TENA Reinigungsprodukte wie TENA Wet Wipes und Wash Cream reinigen, pflegen und schützen in einem.

**Stufe 3:** TENA Barrier Cream und TENA Zinc Cream bieten empfindlicher Haut bei Bedarf zusätzlichen Schutz.

Um diesen neuen Ansatz zu kommunizieren, erhalten alle TENA ProSkin-Verpackungen im Laufe des Jahres ein neues Design.

## Wie kann TENA ProSkin Sie unterstützen?



Mehr Wohlbefinden:  
Ganzheitlicher Ansatz reinigt, schützt und pflegt empfindliche Haut



Zeitersparnis:  
einfachere Pflegeroutinen, weniger Aufwand für Hautpflege

# Artikeldaten

TENA Wash Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Wash Cream, Pumpflasche	42 42	500 ml	10 IV = 10 1
TENA Wash Cream, Pumpflasche	42 49	1000 ml	8 IV = 8 1
TENA Wash Mousse			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Wash Mousse, Spraydose	65 70	400 ml	15 IV = 15 1
TENA Wet Wipe			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Wet Wipe	79 97	32 x 19 cm	12 IV = 576 48
TENA Soft Wipes			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Soft Wipe	74 07 00	19 x 30 cm	8 IV = 1080 135
TENA Soft Wipe	74 07 10	30 x 32 cm	8 IV = 1080 135
TENA Wash Gloves			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Wash Glove	74 04 00	25 x 16 cm	6 IV = 1200 200
TENA Wash Glove, mit Folie	74 05 00	25 x 16 cm	6 IV = 1050 175
TENA Barrier Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Barrier Cream, parfümfrei, Tube	44 19	150 ml	10 IV = 10 1
TENA Zinc Cream			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*
TENA Zinc Cream, parfümfrei, Tube	42 94	100 ml	10 IV = 10 1

\* IV = Innenverpackung



# Das TENA Zusatzsortiment

## TENA Bib Schutzservietten

Praktische Einweg-Schutzservietten mit Fronttasche und Nackenbändchen für hygienischen und würdevollen Schutz bei den Mahlzeiten.



## TENA Bed Bettschutz

Bietet Schutz für Betten und Möbel bei unfreiwilligem Harnverlust und während der Körperhygiene.

In zwei Varianten (TENA Bed Original und TENA Bed Plus) sowie mit Seitenflügeln (TENA Bed Plus Wings) erhältlich.



## TENA Hygiene Sheet

Bequemer, kosteneffizienter Schutz für Betten und Möbel.


- Schutzlaken mit einer dünnen Plastikmembrane zum Schutz von Möbeln oder Matratze
- Starke Vielzweck-Schutzlaken



# Das TENA Basissortiment

## TENA Comfort Original

Einlagen für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz.

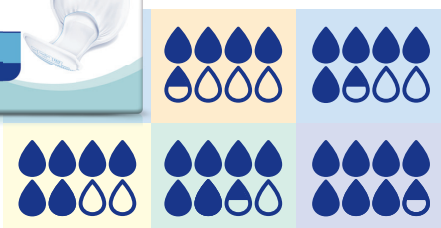

## TENA Slip Original

Schutzhosen für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz.



## Wie können diese TENA Sortimente Sie unterstützen?



Bessere Nachtruhe:  
Auslaufsicherer Schutz für unruhige Personen durch höhere Saugstärken



Zeitersparnis und weniger Arbeitsaufwand:  
durch weniger Wäsche- und Kleidungswechsel

# Artikeldaten

TENA Bib Schutzserviette			
Produktbezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Stück je Karton/Stück je IV*
TENA Bib S/M	37 x 48 cm	72 05 11	6 IV = 900 150
TENA Bib M/L	37 x 68 cm	72 06 11	6 IV = 900 150
TENA Bed			
Produktbezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Stück je Karton/Stück je IV*
TENA Bed Original	60 x 60 cm	77 00 48	4 IV = 160 40
	60 x 90 cm	77 00 49	4 IV = 140 35
TENA Bed Plus	60 x 40 cm	77 01 13	6 IV = 180 30
	60 x 60 cm	77 01 00	4 IV = 120 30
	60 x 90 cm	77 01 04	4 IV = 120 30
TENA Bed Plus Wings	180 x 80 cm	77 11 02	4 IV = 80 20
TENA Hygiene Sheet			
Produktbezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Stück je Karton/Stück je IV*
TENA Hygiene Sheet	140 x 80cm	77 44 52	100 -
	210 x 80 cm	77 44 54	100 -
TENA Protective Sheet	210 x 80 cm	77 44 55	100 -
TENA Comfort Original			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/Stück je IV*	
TENA Comfort Original Normal	21 27 42	3 IV = 126 42	
TENA Comfort Original Plus	21 28 46	2 IV = 92 46	
TENA Comfort Original Extra	21 29 40	2 IV = 80 40	
TENA Comfort Original Super	21 80 36	2 IV = 72 36	
TENA Comfort Original Maxi	21 90 28	2 IV = 56 28	
TENA Slip Original			
Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Stück je Karton/Stück je IV*	
TENA Slip Original Plus S Hüfte 56-85 cm	21 14 26	3 IV = 90 30	
TENA Slip Original Plus M Hüfte 73-120 cm	21 21 30	3 IV = 90 30	
TENA Slip Original Plus L Hüfte 92-144 cm	21 22 30	3 IV = 90 30	
TENA Slip Original Super M Hüfte 73-120 cm	21 23 30	3 IV = 90 30	
TENA Slip Original Maxi M Hüfte 73-122 cm	21 20 24	3 IV = 72 24	
TENA Slip Original Maxi L Hüfte 92-144 cm	21 21 24	3 IV = 72 24	

Farben in der Tabelle entsprechen jeweiliger Produktfarbe, \* IV = Innenverpackung



**Ganzheitliche Inkontinenz- und Wundpflege sowie Kompressionstherapie aus einer Hand. Mit Essity.**

Profitieren Sie jetzt mit Essity von vielen starken Gesundheitsmarken, die sich perfekt ergänzen! Mit uns können Sie hochwertige Hygiene- und Gesundheitslösungen der Weltmarken TENA, Leukoplast, Cutimed und Jobst bündeln, um das Wohlbefinden und die Lebensqualität Ihrer Kunden ganzheitlich zu verbessern. Essity steht für führende Innovationen und Nachhaltigkeit, zuverlässige Produkte und außergewöhnlichen Service.



## TENA Fortbildung für Ihre Mitarbeiter/innen: Ausbildung zum/zur Inkontinenzbeauftragten.

Die Position des Inkontinenzbeauftragten ist eine der wichtigsten in vielen Einrichtungen. Inkontinenzbeauftragte haben einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden der zu betreuenden Personen. Als Experten optimieren sie Arbeitsroutinen und können die Gesamtkosten signifikant senken.

**Sichern Sie sich diese Schlüsselqualifikation für sich und Ihre Einrichtung – und lassen Sie Ihre Mitarbeiter zu Inkontinenzbeauftragten ausbilden!**

### Ihre TENA Fortbildungs-Angebote:

**Für die Teilnahme an der Fortbildung erhalten Ihre Mitarbeiter/-innen ÖGKV PFP® (Pflegefertigungspunkte) – 2 ÖGKV PFP = 1 Fortbildungsstunde laut GuKG.**



#### Modul 1a: Ausbildung zum Inkontinenzbeauftragten

- Aufgaben von Inkontinenzbeauftragten
- Harninkontinenz verstehen
- TENA Produkte und Anlegetechniken
- Richtige Produktauswahl
- Wirtschaftlicher Einsatz von Inkontinenzprodukten
- TENA CARE MANAGEMENT
- Dauer: 7 h, 8 ÖGKV PFP®



#### Modul 1b: TENA Skincare Konzept – moderne Ganzkörper- und Hautpflege

- Anatomie und Physiologie der Haut
- Besonderheiten der Altershaut
- Vermeidung von Hautirritationen
- Pflege empfindlicher Altershaut
- TENA Skincare Complete
- Dauer: 4 h, 6 ÖGKV PFP®



#### Modul 2: Inkontinenzbeauftragter – was nun?

Voraussetzung: Teilnahme am Modul 1a

- Umgang mit der Rolle als Inkontinenzbeauftragter
- Erfahrungsaustausch
- Kommunikationsgrundlagen
- Regeln fürs konstruktive Feedback
- Praktische Anleitung
- Dauer: 6 h, 6 ÖGKV PFP®



Informationen, Anmeldung und Termine bei Ihrem TENA Ansprechpartner

[www.tena.at](http://www.tena.at)