

ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR VERZORGEND WASSEN MET TENA WET WASH GLOVES



Voor een verzorgende, comfortabele en complete reiniging van het hele lichaam. Volg altijd de richtlijnen die binnen uw organisatie gelden met betrekking tot hygiënische lichaamsreiniging.



1 VERWARM HET PAKJE WASHANDJES

Afhankelijk van de wens van de cliënt kunt u de washandjes op kamertemperatuur gebruiken of de gesloten verpakking in de magnetron/microgolfoven verwarmen. **Let op: niet oververhitten** in verband met brandgevaar en om verbranding van de huid te voorkomen. **1 pakje tegelijk, maximaal 30 seconden op maximaal 600 Watt.** Controleer altijd de temperatuur voor gebruik.



2 EÉN VOOR EÉN UITPAKKEN EN GEBRUIKEN

Gebruik bij voorkeur handschoenen én pak de washandjes één voor één uit de verpakking. Sluit tussendoor elke keer de verpakking, zo blijven de resterende washandjes warm.




3 GEBRUIK BEIDE ZIJDEN VAN HET WASHANDJE

Pak het eerste washandje en begin met het gezicht en de hals (1a). Was daarna met de andere zijde van het washandje de volledige linkerkant van het bovenlichaam (1b).



4 WERK VAN HET BOVENLICHAAM IN DE RICHTING VAN DE VOETEN

Pak vervolgens een tweede washandje. Was de volledige rechterkant van het bovenlichaam (2a). Was het rechterbeen met de andere zijde van het washandje (2b). Begin altijd met de dijen en werk verder in de richting van de voeten.

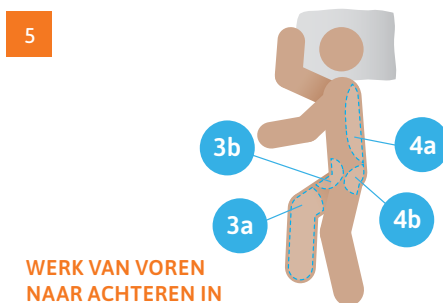

5 WERK VAN VOREN NAAR ACHTEREN IN DE SCHAAMSTREEK

Was het linkerbeen (3a) met het derde washandje. Was de schaamstreek (3b) met de andere zijde van het washandje. Werk altijd van voren naar achteren. Draai de cliënt op de zijde en pak het vierde washandje. Was eerst de rug (4a) en eindig met het wassen van de stuit met de andere zijde van het washandje (4b).



6 AFSPOELEN EN AFDROGEN NIET NODIG

Verzorgend Wassen reinigt en verzorgt de huid. Afspoelen en afdrogen is niet meer nodig. Het advies is om na te deppen met een droog washandje op smetgevoelige plekken waar geen lucht bij komt. Na het wassen van de cliënt alle vier de gebruikte washandjes direct weggooien. Gebruik het eventueel resterende washandje binnen 48 uur.

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

- **Smetgevoelige plaatsen** zoals oksels, liezen en onder de borsten waar geen lucht bij komt **wél droog deppen** (met een droog, zacht, TENA wegwerpwashandje)
- Heren eerst scheren, daarna Verzorgend Wassen
- TENA Wet Wash Gloves alleen gebruiken bij de dagelijkse wasbeurt en niet gebruiken voor andere doeleinden
- Eventueel overgebleven washandjes binnen 48 uur voor dezelfde cliënt als opfrisser of bij de wissel van een incontinentie verband gebruiken
- Gebruik in geval van ontlasting een droge TENA washand met TENA Wash Mousse of Wash Cream
- Om kruisbesmetting te voorkomen: neem geen aangebroken pakjes TENA Wet Wash Gloves mee naar de volgende cliënt



TENA WET WASH GLOVES

HET TENA-PRODUCTOVERZICHT

VERZORGEND WASSEN

PRODUCT	ARTIKEL-NR.	EENHEID PER DOOS		INHOUD
WET WASH GLOVES Mildly scented	1132	45 x 5		Zachte washand met reinigingslotion in drie varianten. Voor de dagelijkse verzorging van het lichaam zonder andere hulpmiddelen.
WET WASH GLOVES Freshly scented	1147	45 x 5		Kunnen voor een extra aangenaam gevoel worden opgewarmd in de magnetron, zie instructie op de verpakking.
WET WASH GLOVES No Parfum	1162	45 x 5		Alle 5 opmaken, maximaal 1 pakje per dag per cliënt (alleen voor het wassen).
DROGE WASHAND 50 stuks in 1 box	740701	12 x 50		Droge washanden die in combinatie met Wash Mousse of Wash Cream gebruikt kunnen worden. Ook in te zetten in combinatie met verzorgend wassen om huidplooiën droog te deppen.
WASH MOUSSE 400 ml spuitbus	6570	15 stuks		Wash Mousse wordt gebruikt bij incontinentie van ontlasting en eventueel sterke vervuiling van het lichaam of bij een sterke lichaamsgeur. Spuit de mousse op een droge washand en dep de mousse op de huid. Laat heel even intrekken en veeg de ontlasting weg. Bij wassen met de mousse bij sterke vervuiling of sterke lichaamsgeur dezelfde werkwijze. Even laten intrekken en gaan wassen. Bij vervuilde handen/ nagels wat mousse in een droge washand. De hand erin stoppen en masserend reinigen. Neemt onaangename geurtjes weg. Naspoelen of afdrogen is niet nodig.
WASH CREAM 500 ml pompje	4242	10 stuks		Wash Cream kan gebruikt worden in combinatie met een droge washand. Doe 1 à 2 pompjes op een droge washand en was daarmee de huid. Geschikt voor de reiniging van intieme plaatsen tijdens incontinentiezorg. Geschikt voor tussentijdse reiniging van handen en gezicht (bijv. na de maaltijden). Neemt onaangename geurtjes weg. Naspoelen of afdrogen is niet nodig.
WET WIPES 48 stuks per pakje	7997 9766	12 x 48		Verzorgingsdoekjes om de huid in één handeling te reinigen, herstellen en beschermen. Geschikt voor de reiniging van intieme plaatsen tijdens incontinentiezorg. Geschikt voor tussentijdse reiniging van handen en gezicht (bijv. na de maaltijden). Neemt onaangename geurtjes weg. Naspoelen of afdrogen is niet nodig.
SHAMPOO CAP	1042	30 stuks		Reinigt en verzorgt het haar als haren wassen in bad of onder de douche niet mogelijk is. Kan voor extra comfort worden opgewarmd in de magnetron (instructie op de verpakking). Naspoelen is niet nodig. Haren goed drogen met een handdoek.