

TENA Produktschulung für Alten- und Pflegeheime

Herzlich Willkommen!



Essity Fakten und Zahlen



Firmensitz in Stockholm,
Schweden.
Vertrieb in etwa **150 Ländern**



Rund **46.000**
Mitarbeiter



Nettoumsatz 2019
(Mrd. Euro) **12,2**

Wussten Sie, dass ...

...Essity mehr als **2.500.000**
Frauen, Männer, Kinder
sowie Pflegerinnen und
Pfleger im Jahr 2018 zum
Thema Hygiene und
Gesundheit schulte?

... Essity eine **Partnerschaft** mit der
United Nations Foundation hat, um die
Ziele für nachhaltige Entwicklung zu
unterstützen und die Hygiene,
Gesundheit und die Lebensqualität
weltweit zu verbessern?

...die „**Essentials Initiative**“ das
Ziel hat, einen weltweiten Dialog
zu Hygiene, Gesundheit und
Wohlbefinden anzustoßen und zu
fördern, um die Hygienestandards
weltweit zu verbessern?



Der Mensch im Mittelpunkt

Wir können etwas bewirken!



Wir ermöglichen jeden Tag
mehr Menschen ein Leben mit
gesteigerter Lebensqualität

Hygienepapiere
für
Endverbraucher



Professionelle
Hygiene



Baby-
pflege



Damenhygiene



Inkontinenz-
produkte



Medizinische
Lösungen

Leukotape®




Leukoplast®



Cutimed®



Weltweit führende Marktposition

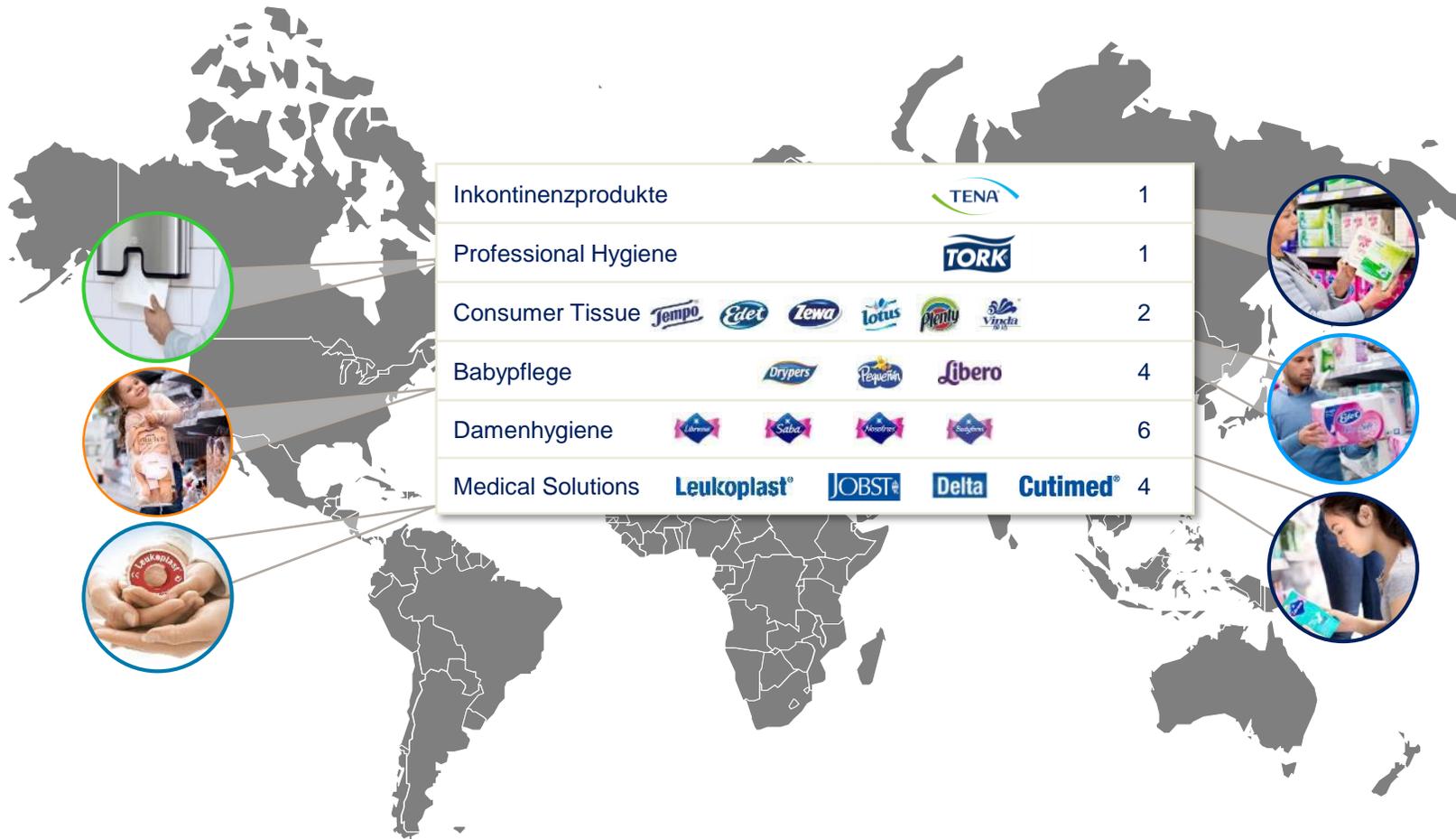

Von Einlagen bis Fixierhosen – TENA Produkte



TENA Lady – Einlagen für diskreten Schutz bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche.



TENA Comfort Mini – Vorlagen für leichte bis mittlere Blasenschwäche auf Verordnung.



TENA MEN – Einlagen speziell für Blasenschwäche bei Männern.



TENA Silhouette und TENA MEN Pants – Schutzunterwäsche, die aussieht und sich trägt wie herkömmliche Unterwäsche.



TENA Pants – saugfähige und atmungsaktive Einweghose für jeden Grad der Blasenschwäche. Einfach wie normale Unterwäsche zu tragen. Mit Anti Leakage Barrier™ – integrierten weichen Barrieren für maximalen Auslaufschutz.



TENA Flex – Vorlagen mit flexiblem Hüftbund für einen schnellen und einfachen Produktwechsel. Für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz geeignet. Das atmungsaktive Material und das Design fördern die Hautgesundheit.



Die neue TENA Slip für mittlere bis schwerste Inkontinenz ist komplett atmungsaktiv. Die neue FeelDry Advanced™ Technologie sorgt für eine schnelle Aufnahme von Flüssigkeit und trägt zur Hautgesundheit bei.



TENA Comfort ist eine Vorlage für mittlere bis schwerste Inkontinenz. Sie ist perfekt mit TENA Fixierhosen zu tragen und trägt zur Hautgesundheit bei.



TENA Fix – Fixierhosen für die sichere Fixierung von Einlagen, waschbar bei 60°

TENA Fix Cotton Special – Fixierung und Unterwäsche in einem, waschbar bei 95°

TENA PROskin



TENA Comfort



TENA Slip



TENA Pants



TENA Flex



TENA Skin Care

TENA ProSkin



TENA ProSkin Inkontinenzprodukte bieten DREIFACHSCHUTZ – Trockenheit, Weichheit und Auslaufsicherheit zur Erhaltung der natürlichen Hautgesundheit



Alle TENA ProSkin Produkte sind dermatologisch getestet und werden unabhängig geprüft



Alle TENA ProSkin Inkontinenzprodukte bieten TENA FeelDry Advanced™ Technologie – für schnelles Aufsaugen und ein natürliches Gleichgewicht der Haut



TENA Sortiment – für Pflegeheime



TENA Pants – saugfähige und atmungsaktive Einweghose für jeden Grad der Blasenschwäche



- Weniger Pflegebedarf bei selbständigen Toilettengängen
- Einfaches Aufreißen durch Perforation an den Seiten



- Erleichtert die Unabhängigkeit
- Geeignet für demenziell veränderte Bewohner

TENA Sortiment – für Pflegeheime



TENA Flex – Vorlagen mit flexiblem Hüftbund für mittlere bis schwerste Inkontinenz und Doppelinkontinenz



- Schnelle & einfache Wechsel im Liegen, Sitzen und Stehen (bei Toilettengängen)
- Rückenschonend



- Verkürzter Eingriff in den Intimbereich
- Hoher Tragekomfort (durch weniger Material an den Seiten und bessere Passform)

TENA Sortiment – für Pflegeheime



TENA Slip für mittlere bis schwerste Inkontinenz



- Mehrfaches Fixieren der wiederverschließbaren und breiten Klettverschlüsse



- TENA Slip bietet einen hautfreundlichen Inkontinenzschutz für semi-mobile und immobile Bewohner

TENA Sortiment – für Pflegeheime



TENA Comfort ist eine Vorlage für mittlere bis schwere Inkontinenz



- Einzigartige Rundumbarriere für einen besseren Auslaufschutz



- TENA Comfort – komfortabler Schutz. Speziell entwickelt, um die Hautgesundheit zu erhalten. TENA Comfort ist perfekt mit TENA Fixierhosen zu tragen

TENA Sortiment – für Pflegeheime



TENA Fix – Fixierhosen für die sichere Fixierung von Einlagen, waschbar bei 60°

- Lange Haltbarkeit durch hohe Qualität

- Hoher Tragekomfort durch textilähnliches und sehr weiches Material

TENA Fix Cotton Special – Fixierung und Unterwäsche in einem, waschbar bei 95°

TENA Sortiment – für Pflegeheime

- TENA Bariatric: Versorgung adipöser Menschen. Würdevoll und komfortabel.
- Größere Größen und bessere Passform für mehr Komfort und Sicherheit
- Atmungsaktive Materialien für eine verbesserte Hautgesundheit
- Odour Control™ für ein frisches Hautgefühl



TENA Pants Plus
XXL



TENA Comfort
Ultima



TENA Fix
Bariatric 4XL



TENA Fix
Bariatric 5XL



TENA Slip
Super XXL



TENA Slip
Super 3XL

TENA – Qualität für alle Bedürfnisse

♀ ♂	3	4	5	6	7	8	9
Saugstärke	Discreet	Normal	Plus	Extra	Super	Maxi	Ultima
TENA Flex 			 S/M/L/XL		 S/M/L/XL	 S/M/L/XL	
TENA Pants 	 M/L	 S/M/L/XL	 XS/S/M/L/XL		 S/M/L/XL	 M/L	
TENA Comfort 		 S/M/L/XL	 XS/S/M/L/XL	 S/M/L/XL	 S/M/L/XL	 S/M/L/XL	 S/M/L/XL
TENA Comfort Mini 			 XS/S/M/L/XL	 S/M/L/XL	 S/M/L/XL		
TENA Slip 			 XS/S/M/L/XL		 S/M/L/XL/ XXL/3XL	 S/M/L/XL	



Zur sicheren Fixierung von TENA Comfort



oder



Das gesamte TENA Produktsortiment finden Sie in der aktuellen TENA Produktübersicht oder unter www.tena.de/fachkraefte

TENA Anlegetechniken

YouTube-Kanal: Essity Professional Inkontinenz TENA

Klicken Sie [hier](#), um zu unserem YouTube-Kanal zu gelangen, wo viele Produktvideos mit Anlegetechniken auf Sie warten.



Essity Professional Inkontinenz TENA

12 Abonnenten

ABONNIEREN

Anlegetechniken

Essity Professional Inkontinenz TENA - 1/8



- 3  Anlegetechnik für TENA Comfort
Essity Professional Inkontinenz TENA
0:59
- 4  Anlegetechnik für TENA Comfort
Essity Professional Inkontinenz TENA
0:52
- 5  Anlegetechnik für TENA Flex
Essity Professional Inkontinenz TENA
1:42
- 6  Anlegetechnik TENA Flex
Essity Professional Inkontinenz TENA
1:14
- 7  Anlegetechnik für TENA Pants
Essity Professional Inkontinenz TENA
0:42
- 8  Anlegetechnik TENA Slip Original
Essity Professional Inkontinenz TENA
1:25

TENA PROskin hilft, die Hautgesundheit zu erhalten

Denn jede Haut hat Ihre eigene Geschichte




Warum der Fokus auf gesunde Haut?

Mit zunehmendem Alter der Haut wird diese dünner sowie fragiler und benötigt mehr Zeit zum Heilen.

Hautirritationen:

- Können für die Bewohner schmerzhaft werden
- Benötigen zusätzliche personelle Ressourcen und Zeit der Pflegekräfte, um diese zu versorgen
- Verursachen zusätzliche Behandlungskosten

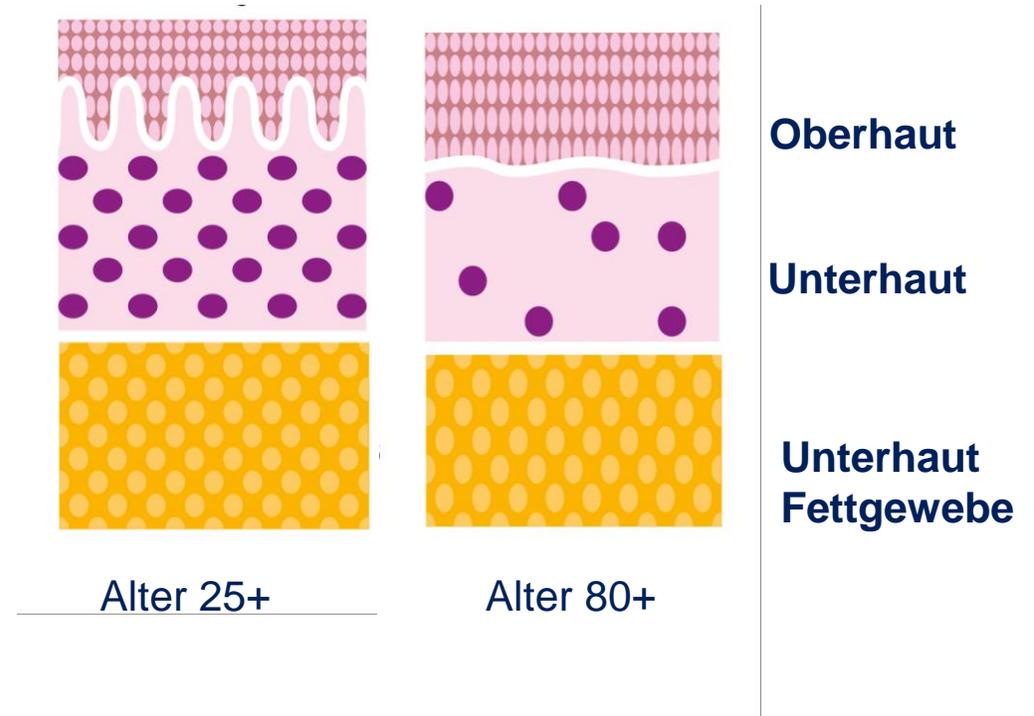

Warum der Fokus auf gesunde Haut?

- Bis zu 50% der Heimbewohner mit Harn- oder Stuhl-Inkontinenz sind von Inkontinenz-assoziiierter Dermatitis betroffen
- Menschen, die Inkontinenzschutz tragen, sind besonders anfällig für Hautschäden
- Diese können durch das Befolgen der richtigen Pflege-Routinen um bis zu 50% * reduziert werden



* Harninkontinenz erhöht die Inzidenz von Druckgeschwüren um mehr als das 5-fache und kann durch die Einhaltung der richtigen Pflegemethoden um bis zu 50% reduziert werden.

die 3-stufige Hautpflege Lösung

Speziell entwickelt, um Sie bei der Pflege der zerbrechlichen Haut Ihrer Bewohner zu unterstützen

Die drei wichtigsten Prinzipien zur Erhaltung der natürlichen Hautgesundheit:

- Halten Sie die Haut trocken, indem Sie hochwertige und saugfähige Produkte verwenden
- Stellen Sie sicher, dass die Haut ordnungsgemäß gereinigt wurde
- Stellen Sie sicher, dass sie mit speziellen Hautpflegeprodukten geschützt ist



TENA PROskin

1 Trocken halten

Atmungsaktive **TENA** Inkontinenzprodukte bieten Schutz und halten die Haut trocken



2 Reinigen

TENA Reinigungsprodukte pflegen und schützen in einem



3 Schützen

TENA Barrier Cream und **TENA Zinc Cream** bieten empfindlicher Haut bei Bedarf zusätzlichen Schutz



TENA PROskin

Intimreinigung

Pflegend reinigen ohne Wasser

TENA Wet Wipe / TENA Wash Cream / TENA Wash Mousse

Vorbeugende Hautreinigung und -pflege mit cremiger 3-in-1-Formel. Fördert die Hautgesundheit, indem sie reinigt, pflegt und schützt (als Creme, Mousse oder feuchte Pflögetücher).



In Kombination mit

TENA Wash Glove

Komfortable, effiziente Einweg-Handschuhe.



TENA Soft Wipes / TENA Cellduk

Ultra-weiche, dicke Waschtücher.



TENA PROskin

Körperreinigung

Traditionell reinigen mit Wasser

TENA Shampoo & Shower

Ein mildes Gel mit doppelter Funktion, speziell für die empfindliche Haut und das Haar älterer Menschen. Für den täglichen Gebrauch – einfach mit Wasser abwaschen.

- Für die klassische Wäsche von Haut und Haar bei gleichzeitigem Schutz der Haut
- Sanfte Formel für empfindliche Haut



500 ml

Körperreinigung

Pflegend reinigen ohne Wasser

TENA Wet Wash Glove

Weiche, mit Reinigungs lotion versehene Waschhandschuhe für die Ganzkörperreinigung ohne Wasser und Seife.



5 Stück



8 Stück

TENA Shampoo Cap

Für die Haarwäsche ohne Wasser. Haube ist mit einem speziellen Shampoo versehen, das nicht ausgespült werden muss.

Vorteil: Man braucht kein Nackenbecken und somit kann das Bett nicht nass werden.



1 Stück

Vorteile wasserfreier Reinigung

TENA Skin Care & Cleansing Sortiment

- ✓ Hilft der Haut den natürlichen pH-Wert zu erhalten
- ✓ Minimiert irritierende Rückstände auf der Haut
- ✓ Senkt die Belastung für Betroffene und Pflegende
- ✓ Weniger Zeitaufwand für Pflegende, mehr Zeit für andere Bedürfnisse des Pflegebedürftigen.
- ✓ Verhindert Kreuzkontaminationen durch Waschbecken und -lappen



TENA PROskin

Hautschutz

Schutz

TENA Barrier Creme

Sanfte, transparente Creme, die eine starke, wasserabweisende Barriere gegen Reizstoffe bietet.



150 ml

TENA Zinc Creme

Extra Schutz für gereizte und empfindliche Haut mit Zinkoxid (10%) und Vitamin E.



100 ml

Hautpflege

Feuchtigkeitspflege

TENA Body Lotion

Leicht parfümierte Lotion mit natürlichen Feuchtigkeitspendern, mit Rapsöl und Provitamin B5.



250 ml

TENA Body Cream

Ergiebige Creme für sehr trockene, empfindliche Haut, mit Rapsöl und Glycerin.




150 ml

TENA Skin Care

Rund um die Uhr optimal versorgt

Empfehlung einer wöchentlichen Hauptpflege

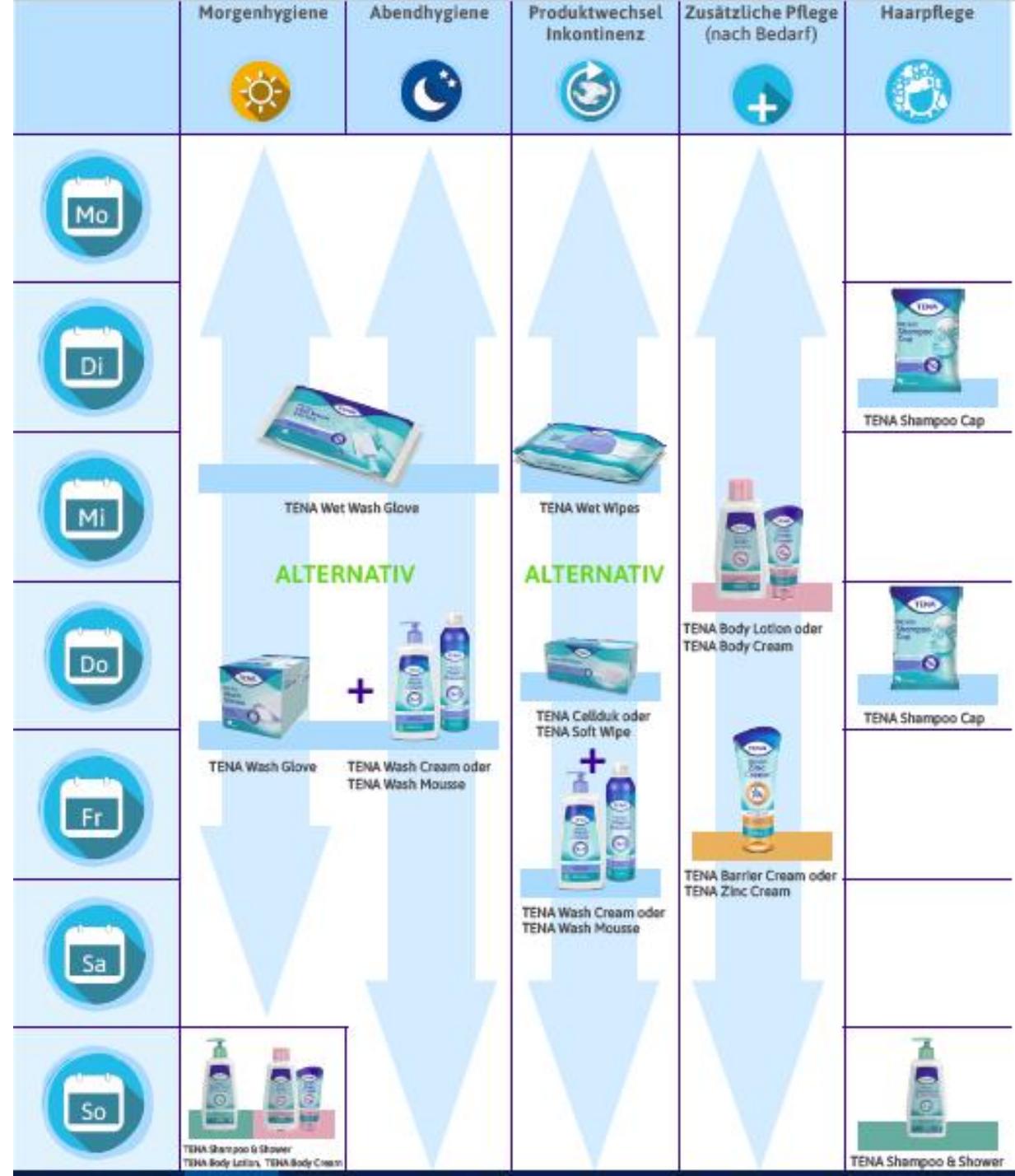

Skin Health Alliance

Die Skin Health Alliance ist eine internationale Organisation, die sich der Hautgesundheit widmet und die mit Dermatologen, Wissenschaftlern und Herstellern für ein gemeinsames Ziel zusammenarbeitet:
Förderung von gesunder Haut

Um eine Auszeichnung zu erhalten, muss man den Standards

- der Produktsicherheit
 - der Wirksamkeit
 - der nachhaltigen Entwicklung
- entsprechen

**TENA - das erste Sortiment von Inkontinenzprodukten,
das von der Skin Health Alliance® ausgezeichnet wurde**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir helfen gerne weiter!

TENA Kundenservice: 0621 / 778 3700

Zu den Gebühren Ihres Telefonnetzes

