



TENA®



STRUČNÁ PRÍRUČKA

TENA SmartCare Change Indicator™

NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

www.tena.sk

Verzia pre EÚ: 2021-04-16

Digitálne riešenie na individuálnu a efektívnu starostlivosť

TENA SmartCareChange Indicator™ je prevratné digitálne technologické riešenie v zdravotníctve navrhnuté na sledovanie úrovne nasýtenia inkontinenčnej pomôcky močom bez potreby častých manuálnych kontrol.

Pri zaznamenaní moču a v prípade potreby výmeny inkontinenčnej pomôcky sú upozornení opatrovatelia prostredníctvom aplikácie v ich smartfóne. To pomáha opatrovateľom zistiť, kedy je potrebná výmena inkontinenčnej pomôcky v prípade, že klient nie je schopný spoľahlivo oznámiť svoje potreby. Výsledkom je lepšie pohodlie a zdravie klientov a vyššia efektivita v zariadeniach sociálnych služieb.

Uistite sa, že si pred použitím systému pozorne prečítate celý návod na použitie pomôcky TENA SmartCare Change Indicator.


Indikátor na výmenu produktu je navrhnutý ako pomôcka pre opatrovateľov, vďaka ktorej sa dokážu rozhodnúť, kedy je správny čas výmeny inkontinenčnej pomôcky bez nutnosti častých manuálnych kontrol. Ale nikdy by nemal nahradiť profesionálny názor opatrovateľa.



Komponenty

PÁSIK SO SENZOROM

Dostupné v troch veľkostiach – vyberte podľa inkontinenčnej pomôcky (pozrite návod na použitie)

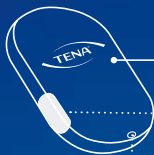

SENZOR

Tlačidlá

LED svetlo

BATÉRIA, CR2032



HLAVNÁ JEDNOTKA

LED svetlo

Tlačidlo



SIĚŤOVÝ ADAPTÉR



LEPIACA PÁSKA



1 Nastavenie systému

Indikátor na výmenu produktu prenáša informácie do aplikácie TENA SmartCare™ Professional Care aj na informačnú stránku prostredníctvom hlavnej jednotky nainštalovanej v izbe klienta a v spoločných priestoroch. Váš TENA reprezentant vám pomôže pri nastavení aplikácie, informačnej stránky aj hlavnej jednotky.

1.1




Aplikácia TENA
SmartCare
Professional Care




Informačná stránka
TENA SmartCare


1.2

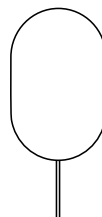

10 m
Hlavná jednotka
musí byť umiestnená
najďalej 10 m.
od indikátora na
výmenu produktu.

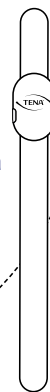

1.3

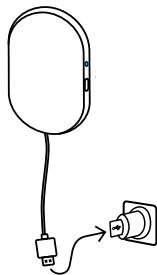

Blikajúce
svetlo = pripája sa



Neprerušované
svetlo = pripojené




Nesvieti
= OK

Počkajte 60 sekúnd, kým začne svetlo blikáť a ďalších 60 sekúnd, kým začne blikáť nazeleno.


2 Zostavenie indikátora na výmenu produktu

VLOŽTE BATÉRIU DO SENZORA ▶

2.1

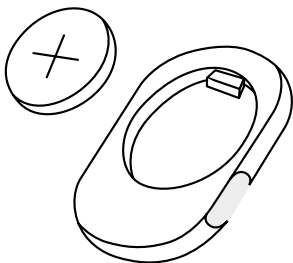

2.2

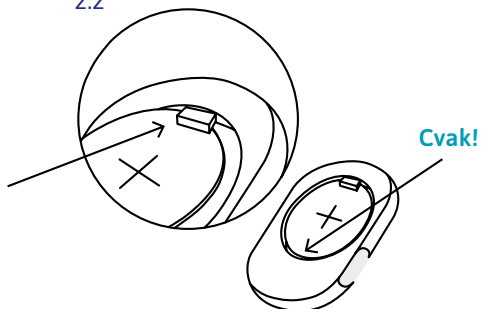


2.3



PRIPOJTE SENZOR K PÁSIKU SO SENZOROM


2.4

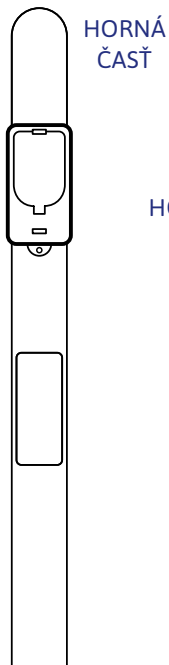

2.5



2.6

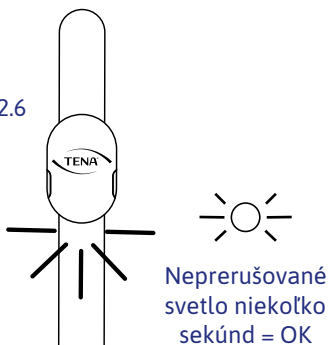

3 Nasadenie indikátora na výmenu produktu

NÁJDITE PREDNÚ STRANU




NEHAJTE ZLOŽENÉ



TENA Slip

3.1
PREDNÁ STRANA

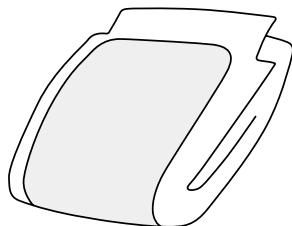


3.2




TENA Pants

3.1
PREDNÁ STRANA

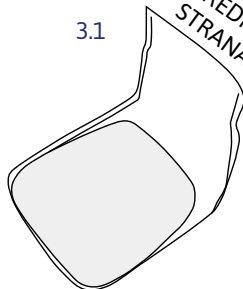


3.2
PREDNÁ STRANA

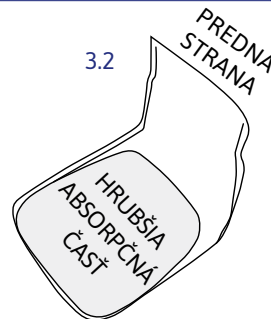



ZAROVNAJTE S HORNOU STRANOU
HRUBŠEJ ABSORPČNEJ ČÁSTI




BEZPEČNE ZAISTITE

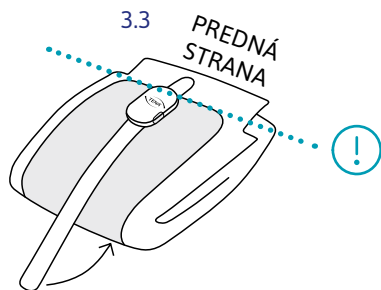

Pevne zatačte! Po celej dĺžke musí tesne priliehať.

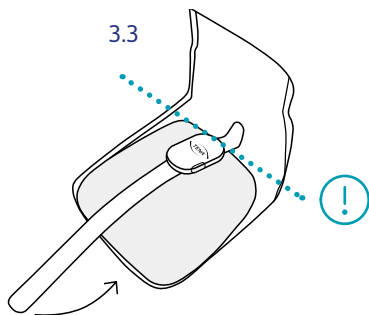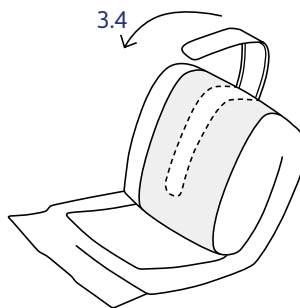

Pevne zatačte! Po celej dĺžke musí tesne priliehať.

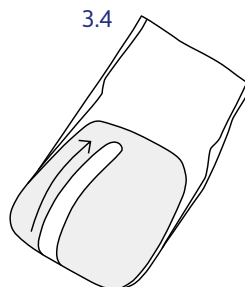

Nasadenie indikátora na výmenu produktu

ROZLOŽTE A NÁJDITE
PREDNÚ STRANU



PRED PRIPOJENÍM ZNOVA ZLOŽTE
S PREDNOU STRANOU ZVONKA




TENA Flex


3.1




3.3

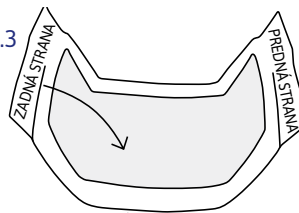


3.2

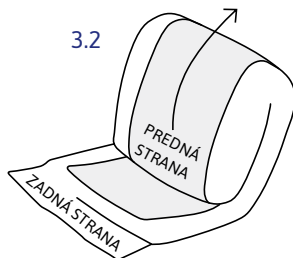

3.4

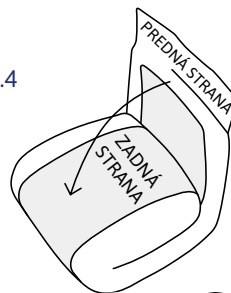


3.5

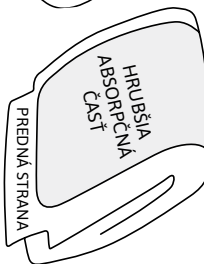


ZAROVNAJTE S HORNOU STRANOU
HRUBŠEJ ABSORPČNEJ ČASTI



BEZPEČNE ZAISTITE

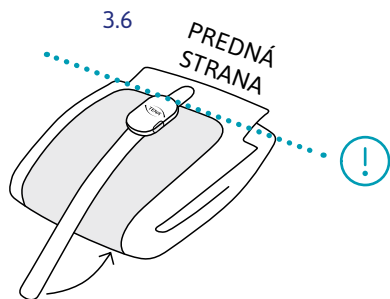

Pevne zatlačte! Po celej dĺžke musí tesne priliehať.

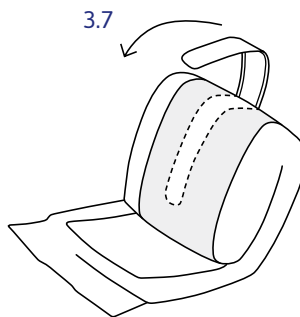

4 Používanie indikátora na výmenu produktu


STLAČTE TLAČIDLÁ



UPEVNITE NA POMÔCKU TENA



4.1

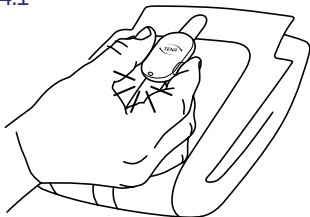


Stlačte obe tlačidlá
na dve sekundy.

Neprerušované svetlo
niekoľko sekúnd = OK



Stlačte obe tlačidlá naraz na dve
sekundy pred a po každej výmene. To
zaznamená výmenu a resetuje systém.

4.2

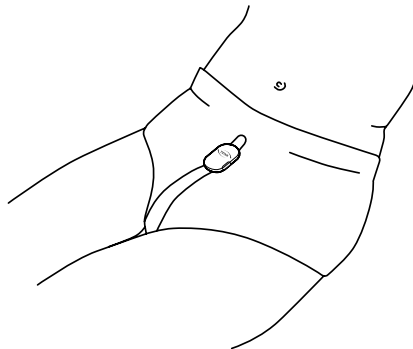


Oblečte pomôcku klientovi.

POSTUPUJTE PODĽA OZNÁMENÍ



ZVÁŽTE VÝMENU

4.3

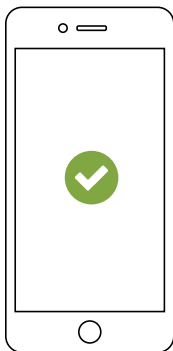


OK

– nie sú potrebné
žiadne kroky.

Inkontinenčná
pomôcka je suchá.

4.4

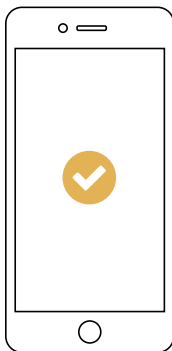


NÍZKA SATURÁCIA MOČU

– nie sú potrebné
žiadne kroky.

Zistil sa moč, ale povrch
pomôcky je stále suchý.

4.5

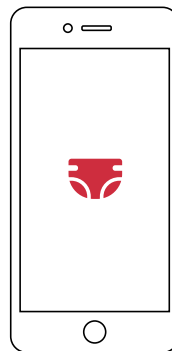

ZVÁŽTE VÝMENU

– zvážte výmenu
pomôcky.

Inkontinenčná pomôcka
sa blíži k plnej saturácii.
Zvážte výmenu inkonti-
nenčnej pomôcky.

V prípade chybného oznámenia si vyhľadajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.


5 Odstránenie a vyčistenie

ODSTRÁŇTE INDIKÁTOR
NA VÝMENU PRODUKTU




VYČISTITE PO ODSTRÁNENÍ
Z POMÔCKY

5.1

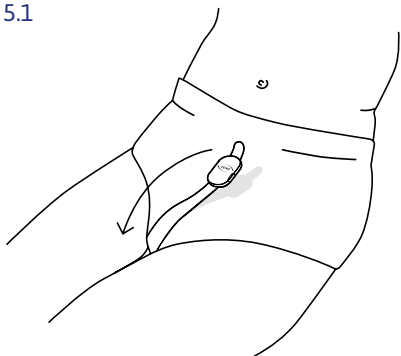

5.2

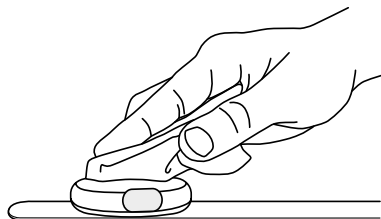

Pred odstránením pomôcky TENA odstráňte indikátor na výmenu produktu.

Začnite hore a jemne stiahnite.

Ak sa indikátor na výmenu pomôcky nepoužíva, položte ho na rovný povrch.

Čistite len po zostavení.

Čistite raz za týždeň alebo podľa potreby.

Použite dezinfekčný prostriedok na základe alkoholu, ak je to potrebné.



Nezabudnite stlačiť obe tlačidlá naraz na dve sekundy pred a po každej výmene.
To zaznamená výmenu a resetuje systém.



Uistite sa, že si pred použitím systému pozorne prečítate celý návod na použitie pomôcky TENA SmartCare Change Indicator™.

Upozornenie:

- Systém nezistí stolicu.
- Ak dôjde k požitiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



**V prípade otázok alebo potreby pomoci,
kontaktujte svojho TENA reprezentanta.
www.tena.sk**



essity

TENA
značka spoločnosti Essity

