

FÅ RÄTT INFORMATION, GE RÄTT VÅRD


I takt med att vi lever längre, växer andelen äldre och vårdbehoven ökar. Brist på vårdpersonal innebär tyngre arbetsbörda och mindre tid för att ge människor den vård de behöver. Digitala lösningar kan användas som stöd till vårdpersonal för att frigöra värdefull tid och förbättra vården.

TENA SmartCare Identifi™ är ett digitalt verktyg som diskret registrerar vårdtagarens läckagemönster kontinuerligt under 72 timmar. Därigenom genereras en detaljerad rapport, unik för varje individs situation.

Informationen i rapporten kan sedan användas för att skapa en personcentrerad vårdplan som inkluderar:

- Toalettbesök vid rätt tidpunkt
- Rätt inkontinensprodukt, storlek och absorptionsnivå
- Lämpliga hudvårdsprodukter
- Mål och aktiviteter som främjar kontinens och självständighet

**TENA SmartCare Identifi™
är kliniskt validerad och kan bidra till**

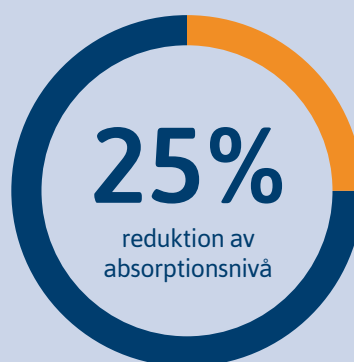

SÅ FUNGERAR TENA SMARTCARE IDENTIFI™

För att starta en registrering, aktivera loggern i TENA SmartCare Identifi webbportal. När loggern aktiveras påbörjas registreringen som pågår kontinuerligt under 72 timmar.



2. Vanliga bytesrutiner

Under registreringen bär vårdtagare TENA Identifi Sensor Wear istället för deras vanliga absorberande skydd. Sensorskydden är bekväma, enkla att sätta på och ta av och byts enligt vanliga bytesrutiner.

3. Samla information

Information samlas i TENA SmartCare Identifi logger, som klickas i framtill på sensorskyddet. Loggern tas av och sätts på vid varje produktbyte. Manuella händelser, t.ex. toalettbesök, dokumenteras parallellt under de 72 timmarna.



4. Tolka rapporten

Efter 72 timmar är registreringen klar och de manuella händelserna förs in i webbportalen. Du kan nu generera den lättöverskådliga rapporten med information om urinmängder och läckagemönster, alltid med bibehållen integritet för individen. Den detaljerade informationen i rapporten används som underlag för att fastställa lämpligast inkontinensskydd, rätt tider för toalettbesök och produktbyten.