



NEU: TENA PROSKIN STRETCH DAY & NIGHT

NEU!



FÜR SCHWERE INKONTINENZ



www.tena.de/stretch

DIE NEUE TENA PROSKIN STRETCH: MEHR SELBSTSTÄNDIGKEIT BEI SCHWERER INKONTINENZ UND EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

Viele Menschen mit mittlerer bis starker Inkontinenz wünschen sich Selbstständigkeit. Doch **7 von 10 benötigen Unterstützung** beim Produktwechsel oder Toilettengang.*

Für Pflegende, deren Angehörige mit eingeschränkter Mobilität leben, bedeutet das oft Zeitaufwand – und für die Betroffenen selbst ein Gefühl von Abhängigkeit und fehlender Würde. Genau dafür wurde das TENA ProSkin Stretch Sortiment entwickelt: Dank elastischem Material und wiederverschließbaren Laschen können sich Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit eigenständiger anziehen.



TOTALE SICHERHEIT BEI TAG UND NACHT

Die neue TENA ProSkin Stretch gibt es sowohl als Tages- als auch als Nachtprodukt, beides in den Größen M und L.



DAS MACHT DIE NEUE TENA PROSKIN STRETCH AUS!



Dreifachschutz für ein rundum trockenes und sicheres Gefühl.

Eigenständig anzuziehen: Anlegen im Sitzen, einfach hochziehen, ohne vollständiges Entkleiden.



Breite, wieder-verschließbare Seitenlaschen zur Mehrfachfixierung und für besseren Sitz.



Atmungsaktives, weiches, textilähnliches Material.



Unsere FeelDry™ Advanced Technology leitet Feuchtigkeit von der Oberfläche weg und hält die Haut trocken.



Gerüche werden sofort und nachhaltig neutralisiert.


EIGENSTÄNDIGES ANLEGEN MÖGLICH

Die neue TENA ProSkin Stretch passt sich dem Körper an, sodass Nutzer das Produkt leichter anlegen können (im Vergleich zu TENA ProSkin Slip & Pants).

Bei einem Nutzertest bestätigten 95 %, dass TENA ProSkin Stretch den Bedarf an Unterstützung beim Wechseln verringert – und damit auch die Notwendigkeit begleiteter Toilettengänge reduziert.* Auch Pflegende profitieren: 20 % fühlten sich weniger körperlich belastet beim Wechseln (im Vergleich zu Pants)**.

MIT DEHNBAREN SEITEN

Elastische Seitenteile, die sich dem Körper anpassen und sowohl sicher als auch bequem sitzen.

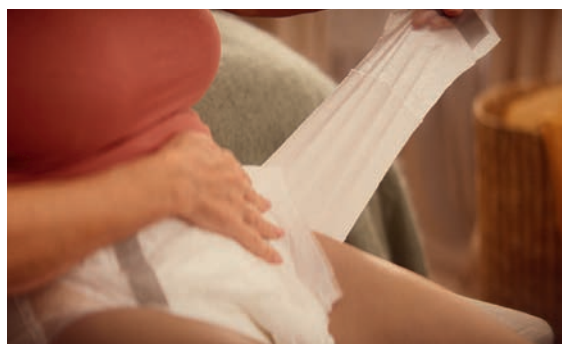

MIT BREITEN, VERSTELLBAREN KLETTVERSCHLÜSSEN

Die Klettverschlüsse sind einfach zu handhaben und bleiben sicher verschlossen. Sie können beliebig oft geöffnet, angepasst und wieder geschlossen werden.



EINFACH HOCH- UND RUNTERZIEHEN

TENA Stretch kann ohne komplettes Entkleiden wie Unterwäsche hoch- und runtergezogen und gewechselt werden. Das erleichtert die Verwendung beim Toilettengang.



*Anwendungsstudie zu Inkontinenzprodukten für Personen mit eingeschränkter Mobilität (TENA Slip, Pants und Stretch), Halmstad University, 2023


**Anwendungsstudie zu Inkontinenzprodukten (TENA Slip, Pants und Stretch), Halmstad University, 2023

ANLEGEHINWEISE

SO WIRD DIE TENA PROSKIN STRETCH ANGELEGT:

Produkt vorbereiten:

- Falten Sie die TENA Stretch vollständig auf.
- Falten Sie die Saugmatte der Länge nach, sodass eine schalenartige Form entsteht.
- Öffnen Sie den Hüftbund an den Verschlüssen.

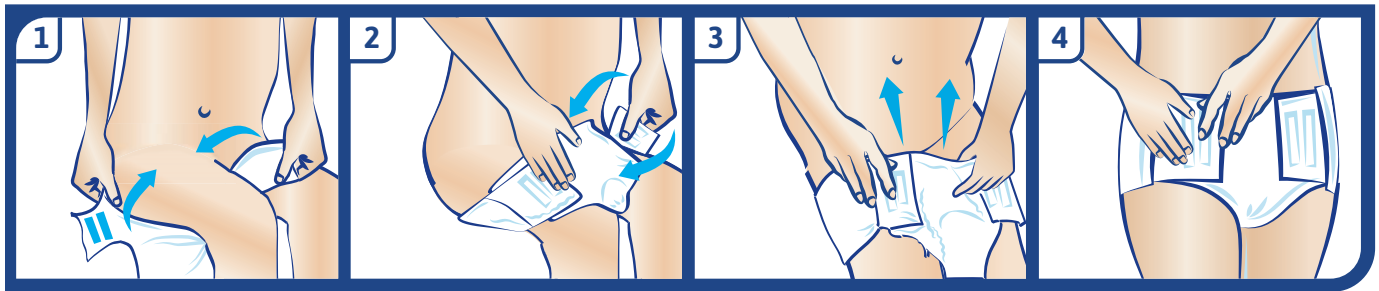

1. Positionierung des Produkts

2. Verschlüsse nacheinander schließen

Befestigen Sie den rechten Verschluss vorne um das rechte Bein. Führen Sie den linken Verschluss unter den Beinen hindurch zur linken Seite. Fixieren Sie ihn vorne um das linke Bein.

3. Produkt hochziehen


Stehen Sie auf und ziehen Sie die TENA Stretch über die Hüften nach oben.

4. Passform anpassen

Der Hüftbund kann beliebig oft geöffnet, angepasst und wieder geschlossen werden, bis das Produkt sicher und bequem sitzt.

HIER GEHT'S ZU DEN TENA PROSKIN STRETCH ANLEGEVIDEOS


Sie können sich das Anlegen auch in einem Video anschauen.

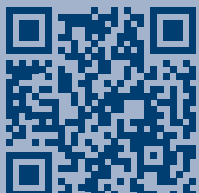

Anlegen im
Sitzen,
eigenständig



Anlegen im
Stehen

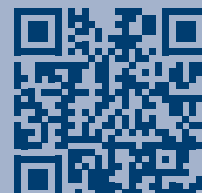

Anlegen im
Liegen

TENA PROSKIN

PERFEKTE LÖSUNGEN

FÜR JEDE ANFORDERUNG

Das TENA ProSkin Sortiment ist speziell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen mit mittlerer bis schwerer Inkontinenz abgestimmt.

Die nachfolgende Übersicht hilft Ihnen dabei, das passende TENA ProSkin Produkt für individuelle Anforderungen zu wählen. Mehr Informationen und Tipps zur Größen- und Saugstärkenbestimmung erhalten Sie im interaktiven TENA Produktfinder: www.tena.de/pflegezuhaus-produktfinder



Mobilität	Mittlere bis schwere Inkontinenz	
	Tag	Nacht
Mobile Betroffene	Pants 	Pants Night 
Teilweise mobile Betroffene*	Stretch Day 	Stretch Night 
Bettlägerige Betroffene	Slip 	

*Eingeschränkt beweglich, braucht evtl. Hilfe beim An- und Ausziehen und beim Toilettengang

Bei Fragen rund um Inkontinenz, für eine Beratung zur Auswahl passender Produkte oder für kostenlose Testmuster:

Rufen Sie uns einfach an: TENA Hotline 01806 - 12 12 22

Festnetz 0,20 €/Anruf, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf. Anrufe sind nur aus Deutschland möglich.