



KURZANLEITUNG

TENA SmartCare Wechselindikator™

ZUR NUTZUNG DURCH MEDIZINISCHE FACHKRÄFTE

www.tena.de

Version EU : 2021-02-18

Eine digitale Lösung für eine individuelle und effiziente Betreuung

Der TENA SmartCare Wechselindikator™ ist eine revolutionäre digitale Gesundheitstechnologielösung, die zur Ermittlung des Nässegrads saugfähiger Inkontinenzprodukte entwickelt wurde und die Notwendigkeit häufiger manueller Kontrollen überflüssig macht.

Wenn Urin festgestellt wird und es an der Zeit ist, einen Wechsel des Inkontinenzprodukts zu erwägen, werden Pflegekräfte über eine App auf ihrem Smartphone benachrichtigt. Auf diese Weise wissen sie, wann Inkontinenzprodukte gewechselt werden müssen, wenn die Bewohner nicht in der Lage sind, dies verlässlich zu kommunizieren. Das Ergebnis sind mehr Komfort und Wohlbefinden für die Bewohner und Effizienzsteigerungen für Pflegeeinrichtungen.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch und machen Sie sich damit vertraut, bevor Sie das TENA SmartCare Wechselindikatorsystem verwenden.


Der Wechselindikator wurde entwickelt, um Pflegekräfte zu unterstützen – durch Entscheidungshilfen zum besten Zeitpunkt für den Wechsel absorbierender Inkontinenzprodukte ohne Notwendigkeit häufiger manueller Kontrollen. Er ist jedoch keinesfalls als Ersatz für die eigene professionelle Einschätzung einer Pflegekraft gedacht.



Komponenten

SENSORSTREIFEN

In drei Längen erhältlich.
Wählen Sie den passenden
Streifen je nach dem
verwendeten
absorbierenden
Inkontinenzprodukt (siehe
Gebrauchsanleitung).

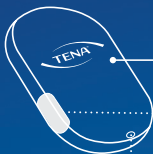

SENDER

Tasten

LED-Licht



BATTERIE, CR2032

GATEWAY

LED-Licht

Taste



NETZTEIL



KLEBESTREIFEN

1 Einrichtung des Systems

Der Wechselindikator übermittelt Informationen an die TENA SmartCare™ Professional Care App und das Dashboard. Dies erfolgt über Gateways, die in den Zimmern der Bewohner und in Gemeinschaftsbereichen installiert sind. Ihr TENA-Vertreter hilft Ihnen bei der Einrichtung von App, Dashboard und Gateways.

1.1




TENA SmartCare
Professional
Care App



TENA SmartCare
Dashboard


1.2

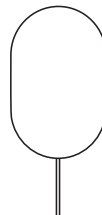

10 m
Das Gateway
sollte innerhalb
von 10 Metern
Entfernung vom
Wechselindikator
positioniert
werden.



1.3

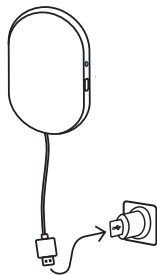

Blinkendes Licht
= wird verbunden



Konstantes Licht
= verbunden



Kein Licht
= OK


Warten Sie bis zu 60 Sekunden, bis das Licht anfängt zu blinken, und weitere 60 Sekunden, bis es grün wird.

2 Zusammensetzen des Wechselindikators


SENDERBATTERIE EINLEGEN




2.1

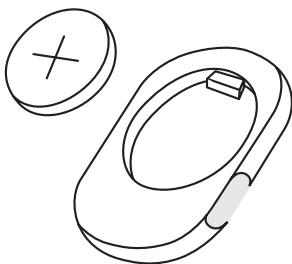



2.2

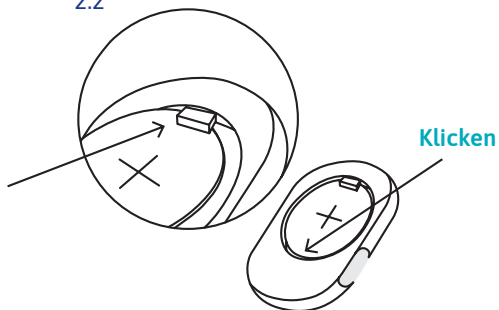


2.3

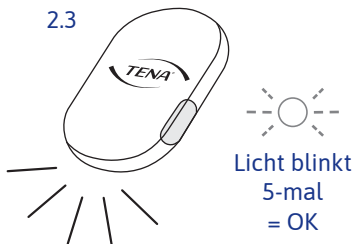

SENDER AM SENSORSTREIFEN BEFESTIGEN

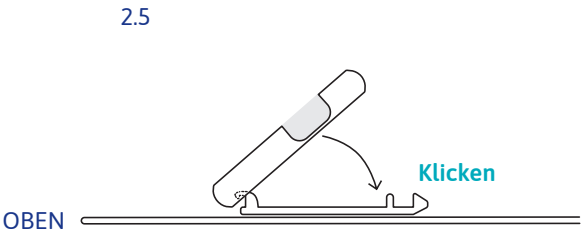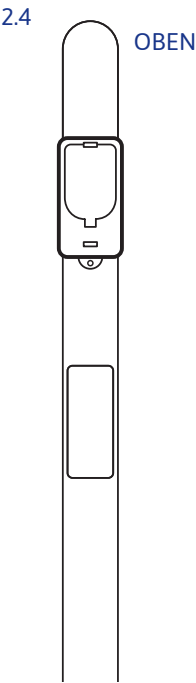

Am oberen Ende beginnen, dann nach unten einrasten

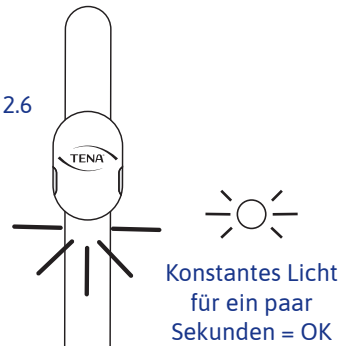

3 Anbringen des Wechselindikators

VORDERSEITE FINDEN




PRODUKT GEFALTET
LASSEN




TENA Slip

3.1

VORDERSEITE

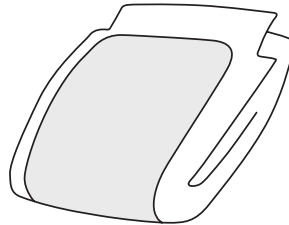


3.2

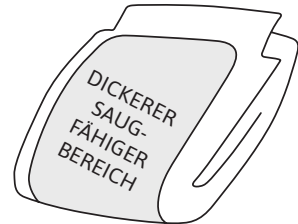

TENA Pants


3.1

VORDERSEITE

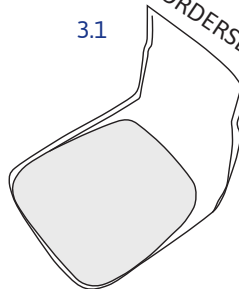

3.2


VORDERSEITE

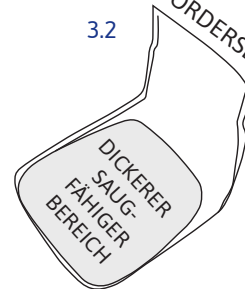


AM OBEREN RAND DES DICKEREN
SAUGFÄHIGEN BEREICHS AUSRICHTEN





FEST ANBRINGEN

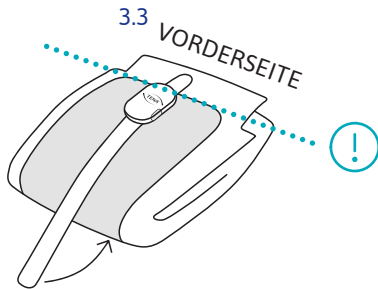

Fest drücken für durchgehend festen Halt

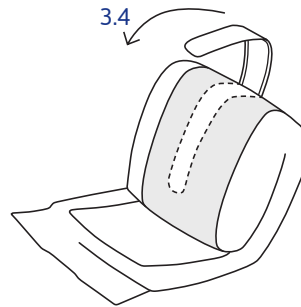

Fest drücken für durchgehend festen Halt

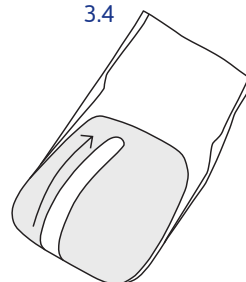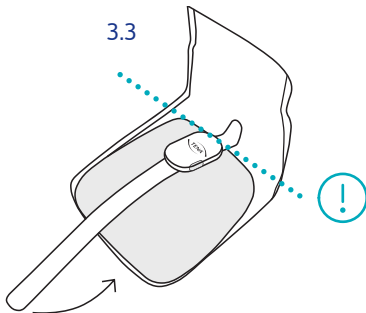


Anbringen des Wechselindikators

AUFKLAPPEN UND
VORDERSEITE FINDEN


VOR DEM ANBRINGEN MIT DER
VORDERSEITE NACH AUSSEN
WIEDER FALTEN

TENA Flex


3.1

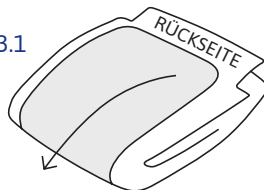


3.2

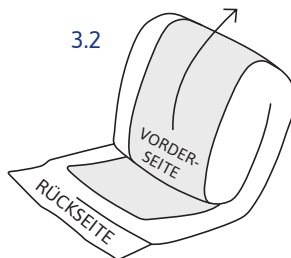


3.3

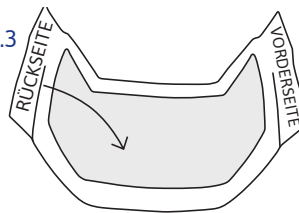

3.4

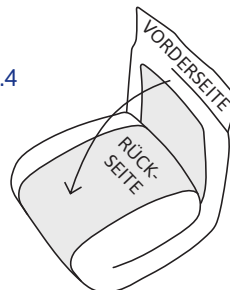


3.5

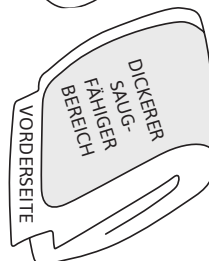


AM OBEREN RAND DES DICKEREN
SAUGFÄHIGEN BEREICHS AUSRICHTEN



FEST ANBRINGEN

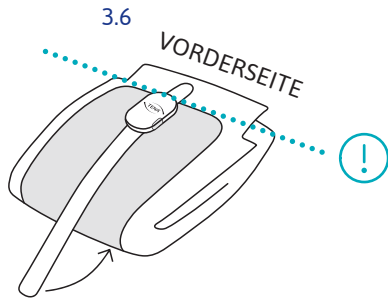

Fest drücken für durchgehend festen Halt

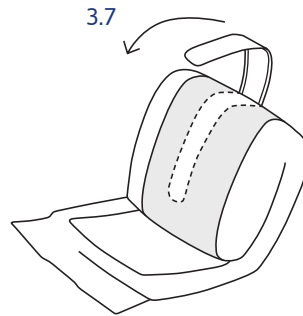


4 Gebrauch des Wechselindikators

TASTEN DRÜCKEN

DAS TENA-PRODUKT ANBRINGEN

4.1

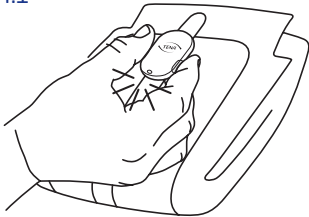


Beide Tasten 2 Sekunden
lang drücken

Konstantes Licht für ein
paar Sekunden = OK



Beide Tasten gleichzeitig zwei
Sekunden vor oder nach jedem
Wechsel drücken, um so den
Wechsel im System aufzuzeichnen
und das System zurückzusetzen.


4.2

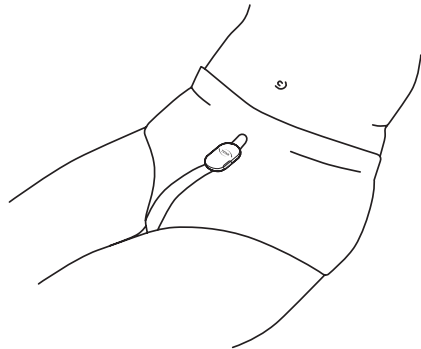

Produkt am Bewohner anbringen




4.3

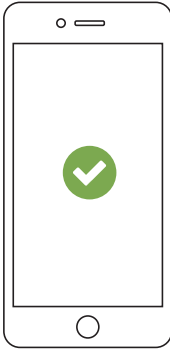**OK****– Kein Handlungsbedarf**


Das absorbierende
Inkontinenzprodukt
ist trocken.

4.4

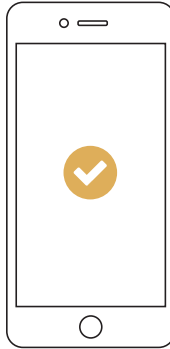**ETWAS URIN****– Kein Handlungsbedarf**

Es wurde etwas Urin
festgestellt, aber die
Oberfläche des Produkts
ist noch trocken.

4.5

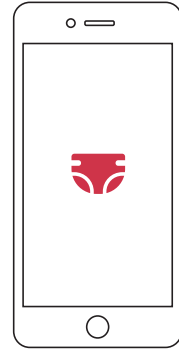**WECHSEL ERWÄGEN****– Wechsel erwägen**

Das Inkontinenzprodukt
näht sich der
Kapazitätsgrenze.
Erwägen Sie den Wechsel
des absorbierenden
Inkontinenzprodukts.


*Bei Fehlermeldungen sehen Sie bitte in der Gebrauchsanleitung nach.
Dort finden Sie weitere Informationen.*

5 Entfernen und Reinigen

ENTFERNEN DES WECHSELINDIKATORS

IM ZUSAMMENGESETZTEN ZUSTAND REINIGEN

5.1

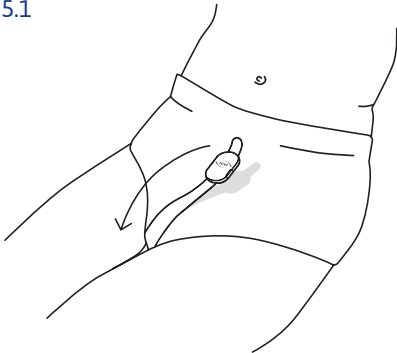


Wechselindikator entfernen, bevor das TENA Inkontinenzprodukt entfernt wird.

Oben beginnen und Wechselindikator vorsichtig abziehen.

Wechselindikator auf eine flache Oberfläche legen, wenn er nicht in Gebrauch ist.

5.2

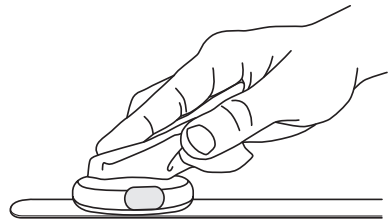

Nur im zusammengeklappten Zustand reinigen.

Einmal wöchentlich oder bei Bedarf reinigen.

Sofern erforderlich, ein alkoholhaltiges Desinfektionsmittel verwenden.




Achtung: Beide Tasten gleichzeitig zwei Sekunden vor oder nach jedem Wechsel drücken, um so den Wechsel im System aufzuzeichnen und das System zurückzusetzen.



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch und machen Sie sich damit vertraut, bevor Sie das TENA SmartCare Wechselindikator™-System verwenden.

Bitte beachten Sie:

- Das System stellt keine Fäzes fest.
- Wird die Batterie versehentlich verschluckt, kontaktieren Sie unverzüglich einen Arzt.

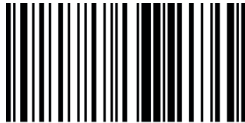

06100763M

Essity Germany GmbH
Sandhofer Straße 176
68305 Mannheim
Februar 2021

**Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen,
wenden Sie sich an Ihren TENA-Ansprechpartner.**
www.tena.de



TENA
eine Marke von Essity

