



DÉFIER LA GRAVITÉ

JOBST®

DIRECTIVES D'APPLICATIONS

JOBST® FarrowWrap® - extrémités inférieures



AVANT DE COMMENCER :

- Avant d'appliquer une thérapie de compression, il faut toujours en parler avec un professionnel des soins de santé. Les présentes directives ne remplacent pas celles d'un expert chevronné.
- Lorsque vous utilisez les pièces de jambe et de pied JOBST FarrowWrap, il est recommandé de porter une doublure JOBST Farrow au genou (sous-bas) et lorsque vous utilisez les pièces de pied, de jambe, de cuisse et de genou JOBST FarrowWrap, il est recommandé de porter une doublure JOBST Farrow à la cuisse.
- Les directives d'application peuvent être utilisées pour l'utilisation de JOBST FarrowWrap LITE et de JOBST FarrowWrap Classic. JOBST FarrowWrap LITE est montré sur l'image.
- Lorsque vous utilisez les produits JOBST FarrowWrap LITE, BASIC et STRONG, positionnez les bandes avec un étirement modéré, et si vous utilisez JOBST FarrowWrap CLASSIC, positionnez les bandes avec un étirement léger. Vous remarquerez que la pièce pour cuisse JOBST FarrowWrap CLASSIC comprend la pièce de genou JOBST FarrowWrap STRONG pour procurer une élasticité modérée au genou.
- Tous les bijoux devraient être retirés de la zone d'application.
- Toute plaie présente sur la zone d'application doit être recouverte d'un bandage approprié avant l'application.


ORDRE : insérez d'abord la doublure JOBST Farrow qui correspond à votre traitement. Placez ensuite par la pièce de pied JOBST FarrowWrap, puis passez à la pièce de jambe JOBST FarrowWrap. Par la suite, appliquez la pièce de cuisse JOBST FarrowWrap avant la pièce de genou.

Application de la doublure JOBST Farrow



Passez la doublure sur les orteils doucement, et remontez ensuite sur la jambe. Enlevez tous les plis. (Si vous utilisez la doublure au genou (1a), donnez à vos orteils assez d'espace de mouvement en tirant légèrement le tissu loin des orteils).

Application de la pièce de pied JOBST FarrowWrap

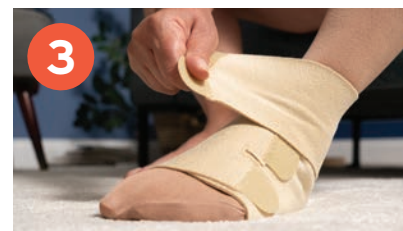

Placez le talon dans l'insert correspondant. Étirez doucement en appliquant une tension modérée et fixez les deux rabats.

Étirez doucement les bandes pour cheville par-dessus le pied vers le côté opposé et fixez; la cheville devrait être à un angle de flexion de 90 degrés.

Application de la pièce de jambe JOBST FarrowWrap



Étendez le FarrowWrap derrière la jambe, le côté avec l'étiquette vers le haut.

Conseil : Pour faciliter la manipulation, vous pouvez commencer par fermer d'abord la bande supérieure sous le genou tel que démontré dans la photo numéro 1.



Tenez la bande la plus près de la cheville par chaque extrémité et tirez vers l'avant pour envelopper la partie inférieure de la jambe en appliquant un étirement léger avant de la fixer avec le VELCRO®. Si vous portez une pièce de pied, cette bande devrait chevaucher la pièce de pied. Appliquez les autres bandes de la même manière.



Répétez la même opération pour chaque bande en remontant le long de la jambe. Lorsque toutes les bandes sont en place, l'étiquette blanche devrait être située juste au-dessous du pli du genou.

Application de la pièce de cuisse JOBST FarrowWrap



Placez la pièce de cuisse sous la cuisse, juste au-dessus du genou, de manière à centrer l'étiquette derrière le haut de la cuisse. Enveloppez la partie inférieure de la pièce de cuisse, juste au-dessus du genou et étirez légèrement la bande avant de la fixer avec le VELCRO®.



Appliquez les autres bandes de la même manière.

Application de la pièce de genou JOBST FarrowWrap



Placez la bande centrale de la pièce de genou sous le genou, avec ou sans coussinet de mousse. Enveloppez la bande centrale alentour du genou en appliquant un étirement modéré.



Placez les autres bandes de la même manière. La bande centrale devrait être visible au milieu de la rotule.

REMARQUES :

- JOBST FarrowWrap doit être réajusté régulièrement au besoin pour assurer un ajustement adéquat.
- Pour éviter que la partie du VELCRO s'attache là où il ne le faut pas lorsque vous placez les bandes, elle peut être retournée sur elle-même et retenue en place.
- Si désiré, repliez la partie de doublure qui dépasse par-dessus l'extrémité de la pièce de jambe ou de cuisse JOBST FarrowWrap.



CONSEILS POUR UNE APPLICATION CORRECTE



Directives de lessive

Fermez les attaches en Velcro pour éviter qu'elles ne s'accrochent. Utilisez toujours une housse de lavage pour protéger le produit.



Couvrir les blessures

Avant d'appliquer JOBST FarrowWrap, assurez-vous que toutes les plaies sont nettoyées à fond. Toute plaie présente sur la zone à traiter doit être couverte d'un bandage approprié avant d'appliquer le vêtement de compression.



Port de chaussures appropriées

Il est important de porter des chaussures sécuritaires pour réduire le risque de chutes et protéger le système de compression médicale JOBST FarrowWrap d'une usure prématurée.



Entreposage

Pour assurer une durée de vie utile plus longue au vêtement de compression JOBST FarrowWrap, il devrait être entreposé adéquatement. Nous recommandons de replier les attaches en Velcro vers l'arrière et de les fermer pour éviter qu'elles ne s'accrochent.

Complément d'information disponible au www.jobstcanada.com