

TENA Identifi™ is bewezen effectief

Betere individuele zorg op maat

Met TENA Identifi™ beschikt u over waardevolle informatie en bepaalt u eenvoudig én objectief de juiste toiletroutine, productkeuze en verschoonfrequentie van elke cliënt.


Al meer dan vier jaar in de praktijk in Nederland bewezen*



Besparing uren
verzorging per
cliënt/per jaar:
86,7 uur



Afname
lekkages:
66%

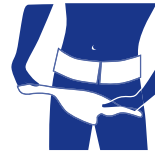

Afname
verbandwissels:
22%

Afname
onnodige
toiletbezoeken:
6%**






Afname
urineverlies:
14%



Afname
afval:
36%



Verbandkeuze, lagere absorpties:

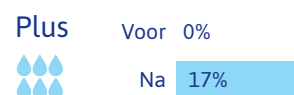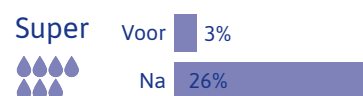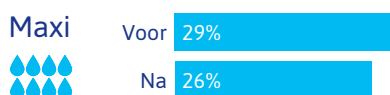

* Referenties op aanvraag, data betreffen N=63

** Voorheen vaste toiletronden, nu vooral afgestemd op plaspatroon van elke individuele cliënt

Zorg op maat voor elke cliënt

Meer comfort

- Verbandkeuze zo comfortabel en discreet mogelijk: verbanden met lagere absorptie vaak meer dan voldoende
- Zorg aangepast aan mictiepatroon cliënt: minder urineverlies, meer plassen op toilet
- Beter doorslapen tijdens de nacht: overdag fitter

Voordelen voor de verzorgende

Betere zorg bieden

- Afname van lekkages: minder verschoningen van bed en kleding
- Tijdsbesparing: meer tijd voor andere zorgtaken

Hoe werkt TENA Identifi™?

TENA Identifi Sensor Wear-verbanden vervangen 72 uur de gebruikelijke incontinentieproducten. De verbanden bevatten veilig geïntegreerde, dunne sensoren waarmee het mictiepatroon gemeten wordt. De op het product bevestigde en

herbruikbare Identifi™ Logger zendt de data naar een beveiligd webportaal waar het automatisch verwerkt wordt tot een helder en goed leesbaar rapport. Vanzelfsprekend is de privacy van de cliënt daarbij altijd beschermd.



Wilt u ook uw cliënten op feiten gebaseerde continenzorg op maat bieden?

Bel ons via 030 - 69 84 700 of vraag uw Essity-contactpersoon.

 www.TENA.nl/professionals

 sales.support.nl@essity.com